



Медична приліжкова тумба

OSD-9100-BS

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки.....	3
3. Технічні характеристики.....	3
4. Загальна характеристика.....	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	4
6. Умови гарантії	5

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



УВАГА

Не використовуйте приліжкову тумбу, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте приліжкову тумбу у випадку пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Медична приліжкова тумба «OSD-9100-BS» (далі за паспортом – приліжкова тумба) – рекомендована для застосування у медичних закладах та вдома.

Приліжкова тумба «OSD-9100-BS» розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

1. Перед початком використання приліжкової тумби або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані.
2. Будь-які пошкодження повинні бути **УСУНУТІ**.
3. **НЕ СИДІТЬ** на приліжковій тумбочці та **НЕ КАТАЙТЕСЯ** на ній.
4. Поверхню приліжкової тумби **ПОТРІБНО** протирати вологою тканиною. Засоби для чищення повинні бути м'якими. Можна використовувати побутові очисні засоби.



УВАГА

Під час повторного використання приліжкової тумби необхідно протерти та продезінфікувати її, а також провести загальний огляд технічного стану.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування приліжкової тумби, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель	OSD-9100-BS
Матеріал	метал, пластик
Ширина, (см)	46
Висота, (см)	86
Глибина, (см)	46
Вага, (кг)	14,5

4. Загальна характеристика

У приліжковій тумбочці передбачений висувний столик, шухляда та чотири колеса з гальмами. Використовується в медичних закладах та в домашніх умовах з метою підвищення комфорту та полегшення догляду за людьми, які тривалий час перебувають в умовах стаціонару або постільного режиму. За допомогою коліс виріб можна посунути ближче до ліжка й зафіксувати у потрібному місці за допомогою гальм.

Усі матеріали, застосовані у виробництві, є біологічно безпечними для шкіри пацієнтів та медичного персоналу.

Медична приліжкова тумба поставляється у зібраному вигляді.

5. Технічне обслуговування і догляд



Перевіряйте справність приліжкової тумби перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкодженнь або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

Приліжкова тумба розроблена для застосування протягом тривалого часу. Термін її служби 10 років за умови дотримання усіх правил експлуатації.

Багаторазове пересування, неправильне використання, а також тривале застосування можуть призводити до пошкодженнь й ознак зносу, що може створити привід до несправності виробу, якщо не усувати такі дефекти вчасно.

Догляд

Чистити поверхню приліжкової тумби необхідно вологою та м'якою ганчіркою. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати.

На разі забруднення приліжкової тумби інфекційними або потенційно небезпечними речовинами необхідно продезінфікувати миючим засобом.



У лікарнях необхідна постійна дезінфекція. На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати приліжкову тумбу, щоб уникнути інфекцій.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції приліжкової тумби, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



6. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:
Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____