

YAMAGUCHI



массажная накидка
TURBO

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ознакомиться с продукцией
компании Yamaguchi можно на
сайте www.us-medica.ua



СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые особенности.....	4
Меры предосторожности.....	5
Описание деталей.....	6
Использование.....	7
Описание режимов работы.....	8
Устранение неполадок.....	11
Хранение и уход.....	12
Технические характеристики.....	13

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Четырехроликовый массажный механизм для массажа спины
- Четырехроликовый массажный механизм для массажа шеи
- Резиновые массажные ролики
- 3 автоматических режима массажа
- 3 уровня интенсивности автоматических режимов
- Разминающий роликовый массаж спины
- Разминающий роликовый массаж шеи
- 3 уровня интенсивности массажа шеи
- Регулировка роликов по высоте при массаже шеи
- Воздушно-компрессионный массаж спины, бедер и ягодиц
- 3 уровня интенсивности воздушно-компрессионного массажа
- Опциональный прогрев спины
- Вибрационный массаж ягодиц
- Для дома и офиса
- Таймер: 15 минут

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.


- Сохранность и эффективное использование массажной накидки возможны только в случае ее применения исключительно по назначению.
- До начала массажа проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажную накидку. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться накидкой без присмотра со стороны.
- Массажная накидка должна быть установлена в вертикальном положении на стуле или кресле; не используйте накидку в горизонтальном положении — под весом тела возможно повреждение массажных роликов.
- Не вставляйте на накидку ногами и не помещайте на нее тяжелые предметы.
- Не используйте накидку в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.
- Не используйте накидку вблизи раскаленных предметов.
- Ни в коем случае не используйте накидку при видимых повреждениях шнура или вилки!
- Для массажа используйте удобную одежду, не стесняющую движений.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания.
- Запрещено касаться накидки влажными руками!
- Обязательно отключайте устройство от сети после использования.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование!

- Не засыпайте во время использования накидки.
- Не используйте накидку в сложенном виде.
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа, немедленно прекратите использование накидки и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Массажная накидка не предназначена для терапевтических или лечебных целей.
- Не используйте накидку дольше, чем 15 минут за один сеанс.

При наличии одного из следующих условий, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажной накидки:

- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- больным, проходящим курс лечения после травм и других повреждений;
- при заболеваниях остеопорозом;
- при острых заболеваниях;
- при высоком давлении;
- при сердечно-сосудистых заболеваниях;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- при наличии злокачественных опухолей;
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- детям до 12 лет в период формирования костно-мышечной системы.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

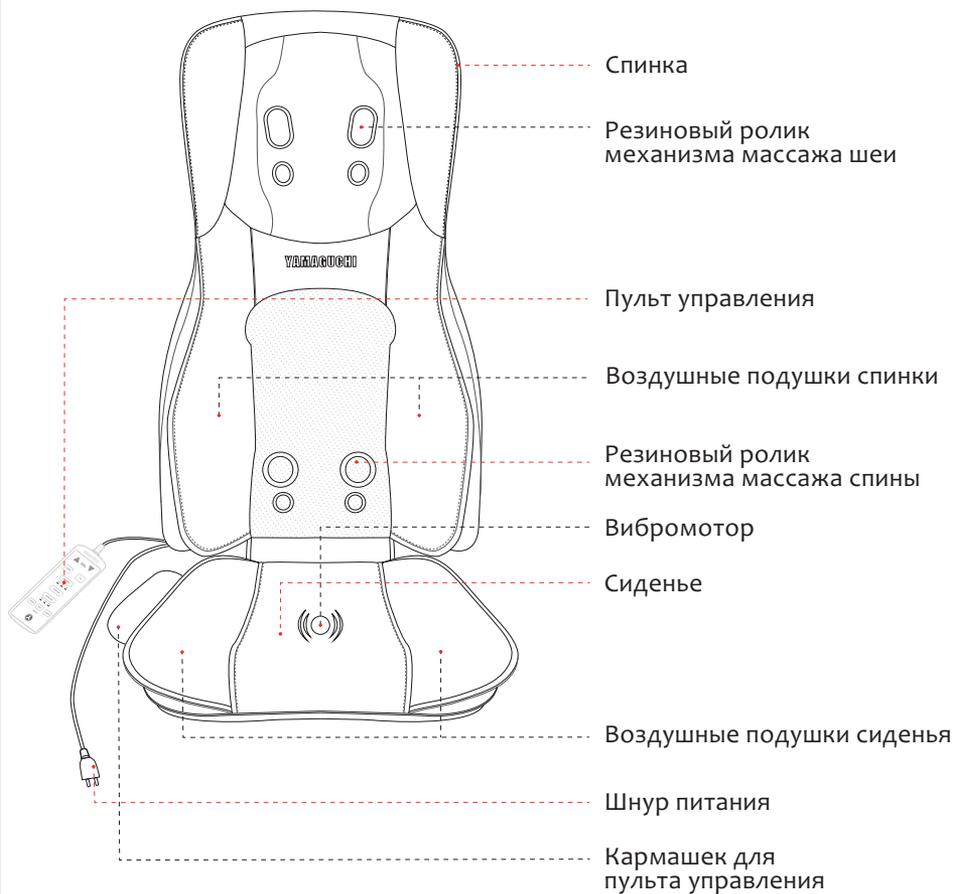


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Закрепите накидку на стуле или кресле при помощи фиксирующих ремней, расположенных на задней поверхности накидки.
- Подключите шнур питания к сети переменного тока 220 В.
- Нажмите кнопку **Y** на пульте управления (стр. 8) для включения массажной накидки. Кнопка подсветится красным цветом.
- Выберите нужный режим массажа нажатием на соответствующую кнопку.
- Через 15 минут накидка выключится автоматически.
- Для немедленного завершения сеанса массажа, нажмите на кнопку **Y** на пульте управления для выключения массажной накидки. Массажные ролики при этом вернуться в исходное положение и накидка выключится.
- Отключите накидку от источника питания.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Пульт управления

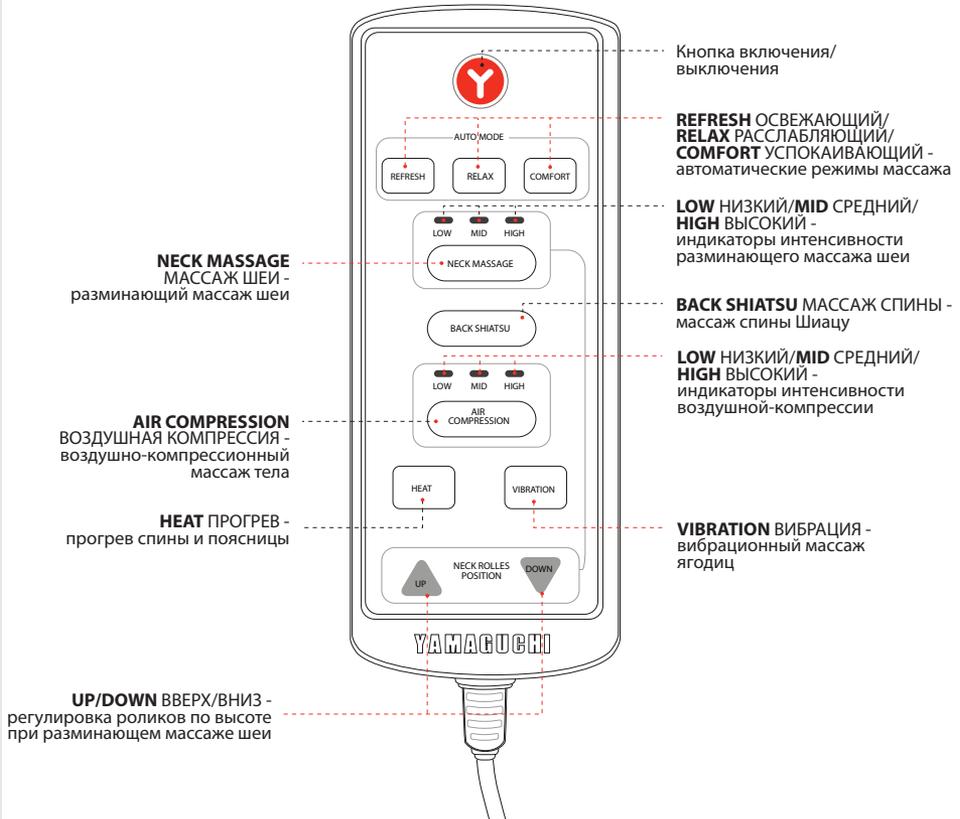

Режим	Описание
<p>Автоматические режимы массажа REFRESH RELAX COMFORT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите на одну из трех кнопок автоматических режимов: REFRESH (Освежающий). Воздушно-компрессионный массаж тела + роликовый массаж шеи. • RELAX (Расслабляющий). Воздушно-компрессионный массаж тела + роликовый массаж спины и шеи. • COMFORT (Успокаивающий). Воздушно-компрессионный массаж тела + роликовый массаж шеи. • Начнется выбранный массаж. <p><i>Примечание.</i> Во время расслабляющего массажа RELAX Вы можете дополнительно включить режим прогрева, т. к. данный режим активен только при роликовом массаже спины. Для этого нажмите на кнопку HEAT на пульте управления.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Повторно нажимайте на одну из кнопок REFRESH/RELAX/COMFORT для выбора одного из трех уровней интенсивности массажа - низкий, средний, высокий. • Нажмите на кнопку REFRESH/RELAX/COMFORT в четвертый раз для отключения выбранного режима. <p><i>Примечание.</i> Во время автоматических режимов Вы можете дополнительно включить вибрационный массаж бедер и ягодиц. Для этого нажмите на кнопку VIBRATION на пульте управления. Для отключения режима вибрации, повторно нажмите на данную кнопку.</p>
<p>Режим роликового массажа шеи NECK MASSAGE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку NECK MASSAGE на пульте управления. Начнется разминающий массаж шеи. • Для выбора уровня интенсивности массажа шеи, последовательно нажимайте на кнопку NECK MASSAGE. С каждым нажатием уровень интенсивности массажа будет возрастать. При этом будут загораться соответствующие световые индикаторы - LOW (Низкий), MID (Средний), HIGH (Высокий). • Во время массажа шеи Вы можете отрегулировать положение роликов по высоте. Для этого нажмите и удерживайте кнопку UP или DOWN для перемещения роликов по направлению вверх или вниз. После того, как массажные ролики достигнут нужного положения, просто отпустите нажатие кнопки UP или DOWN. <p><i>Примечание.</i> Данный режим может работать как самостоятельно, так и совместно с роликовым массажем спины, воздушной компрессией и вибрацией.</p>

<p>Режим роликового массажа спины BACK SHIATSU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку BACK SHIATSU на пульте управления. Начнется разминающий массаж спины. • Нажмите кнопку BACK SHIATSU еще раз для выключения разминающего массажа спины. <p><i>Примечание.</i> Данный режим может работать как самостоятельно, так и совместно с роликовым массажем шеи, воздушной компрессией, прогревом и вибрацией.</p>
<p>Режим вибрационного массажа бедер и ягодиц VIBRATION</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку VIBRATION на пульте управления для включения вибрационного массажа бедер и ягодиц. • Нажмите кнопку VIBRATION еще раз для выключения режима вибрационного массажа.
<p>Режим прогрева спины HEAT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку HEAT для включения режима прогрева спины. • Нажмите кнопку HEAT еще раз для выключения режима. <p><i>Примечание.</i> Данный режим активен только для режима массажа спины.</p>

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Решение
Во время работы массажной накидки слышен шум	Шум вызван работой массажных роликов	Это нормальное явление, шум не является неисправностью массажной накидки
Устройство не работает	Нет подачи электричества	Восстановите подачу электричества
	Аппарат не подключен к сети	Подключите аппарат к сети
	Массажная накидка не включена	Нажмите на кнопку включения/выключения Y на пульте управления
Режим прогрева спины HEAT не работает	Данный режим активен только при массаже спины	Выберите режим массажа спины
Внезапное прекращение работы	Прекратилась подача электричества	Необходимо восстановить подачу электричества
	Сработал автоматический таймер отключения	Отключите накидку от сети

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Хранение

- Поместите массажную накидку в упаковку.
- Храните массажную накидку в сухом и прохладном, хорошо вентилируемом месте.
- Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить ткань накидки.
- Во избежание повреждения не наматывайте шнур питания вокруг накидки.
- Не подвешивайте накидку за шнур пульта управления.

Уход

- Прежде чем начать чистить изделие, отключите его от сети и дайте ему остыть.
- Очищайте изделие мягкой, слегка влажной губкой.
- Во время чистки изделия, не погружайте накидку в воду или в другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	Массажная накидка
Модель	TURBO
Напряжение	220 В, 50/60 Гц
Мощность	60 Вт
Вес	8,5 кг

YAMAGUCHI®
by YAMAGUCHI ELECTRONICS SOLUTIONS, CO. LTD.