

beurer

BEURER GmbH & Co. • Söflinger Str. 218 • D-89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0) 7 31 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 7 31 / 39 89-145 • Mail: kd@beurer.de
www.beurer.de

FWM 40



Инструкция по эксплуатации

Обогреватель для ног с массажером

Важные указания - сохранить для последующего использования!

- С обогревателем для ног, как и любым другим электрическим прибором, необходимо обращаться особо осторожно, так как в противном случае возможно травмирование людей, возгорание или повреждение прибора. Приводимые указания в связи с этим должны соблюдаться неукоснительно.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, как личный бытовой обогреватель для ног.
- Прибор запрещается использовать для обогрева животных.
- Прибор запрещается использовать для беспомощных лиц и лиц, не чувствительных к теплу.
- Используйте только прилагаемый оригинальный блок питания.
- Запрещается подключение блока питания к электросети, напряжение которой не совпадает с напряжением, указанным на фирменной табличке блока питания.
- Не используемый прибор отсоедините от электросети, для этого необходимо вынуть вилку прибора из сетевой розетки. Прибор храните в оригинальной упаковке.
- Никогда не оставляйте без присмотра работающий обогреватель для ног.
- Прибор работает с небольшой мощностью, идущей на нагрев, так как тепловое воздействие лишь содействует проведению массажа.
- Перед каждым использованием обогревателя для ног проверяйте состояние непосредственно самого обогревателя для ног, блока питания, выключателя и электрического шнура. В случае выявления поломок или износа дальнейшее пользование прибором категорически запрещено! Для проверки или ремонта прибора обратитесь к обслуживающему Вас дилеру или по указанным адресам сервисных мастерских.

Применение обогревателя для ног

- Применяйте обогреватель для ног, предварительно сняв обувь, в противном случае работа прибора будет неэффективной, и он загрязнится.
- Обогреватель для ног можно использовать в следующих режимах:

1. Только массаж (🌀)

В этом режиме возможен выбор 2 уровней:

- уровень I (низкий): успокаивающий массаж;
- уровень II (высокий): стимулирующий массаж.

2. Только обогрев (☀)

- Переключатель массажа стоит в положении "0"

3. Массаж (🌀) с обогревом (☀)

Возможен выбор любого уровня массажа

4. Без массажа, без обогрева - оба переключателя находятся в положении "0"

Очистка

Вынимаемую мягкую подкладку можно стирать при температуре 40 °С. Если же загрязнена внешняя сторона обогревателя, то ее очистку можно выполнить следующим образом:

- Сначала отключите прибор от электросети. Для этого выньте вилку прибора из сетевой розетки.
- Протрите загрязненное место влажной тряпкой, не допускайте при этом промокания электроприбора.
- Застежку-молнию разрешается расстегивать только специалистам, проводящим работы по техническому обслуживанию.

Обогреватель для ног с массажером является электроприбором, поэтому перед каждым его применением Вам необходимо убедиться в том, что он совершенно сухой, т.к. в противном случае пользоваться им категорически запрещается.

