

**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОМОТОРОМ
OSD-91EU**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Спасибо, что отдали предпочтение нашей продукции.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и
придерживайтесь ее во время использования изделия.



Это изделие соответствует стандарту европейской Директивы
93/42/ЕЕС



Не используйте кровать, не ознакомившись с инструкцией

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание
2. Технические характеристики
3. Инструкция
4. Общие указания
5. Обслуживание
6. Предупреждение
7. Гарантия

1. ОПИСАНИЕ

Кровать OSD-93EU принадлежит к 1-му классу медицинских изделий; используется для пациентов в больницах, а также в домашних условиях. Конструкция кровати состоит из металлической рамы, головной и ножной секций, электрического мотора и пульта дистанционного управления. Пульт управления позволяет регулировать угол наклона головной и ножной секции, что обеспечивает максимальный комфорт пациенту и персоналу. Кровать выкрашена в бежевый цвет, боковые спинки украшены кремовыми металлическими панелями бежевого цвета. Дополнительно кровать со стороны головной секции можно комплектовать надкроватной трапецией; ножки можно оборудовать колесами с тормозами; также можно комплектовать по желанию клиента универсальными перилами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка: 200 кг

Длина матрасной базы: 193,5 см

Общая длина: 206 см




Высота: 92 см

Высота от пола: 34-64 см

Цвет: бежевый

Угол наклона головной секции: 80°


Угол наклона ножной секции: 35°

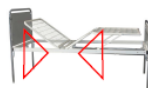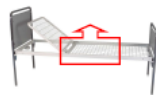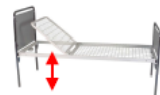

ИНСТРУКЦИЯ

Кровать доставляется в разобранном виде. Сборка и настройка медицинской кровати не требуют особых навыков или знаний, специального инструмента.

Остерегайтесь защемления пальцев!

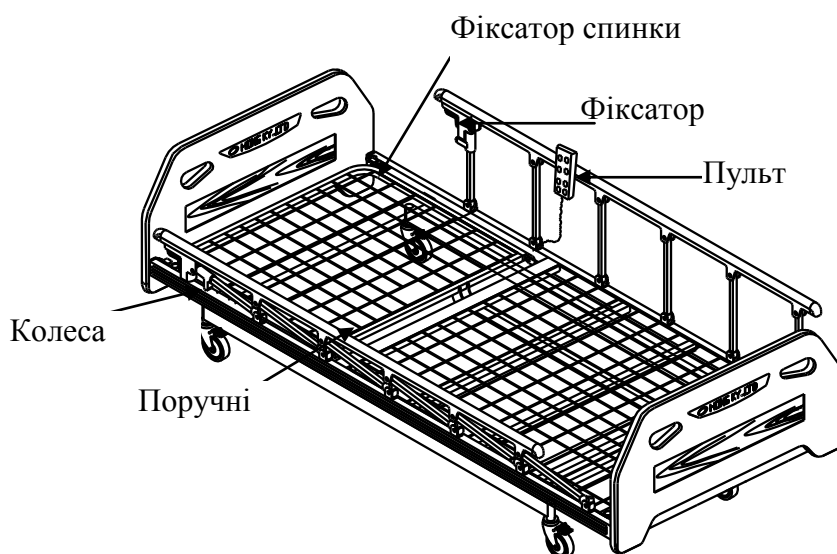

КОЛЕСА:

- Наступить → чтобы заблокировать (1a)


- Поднять носком обуви заглушку → чтобы разблокировать (1b)

1a
1b

Головные и ножные спинки:


Легко снимаются при помощи двух красных фиксаторов, размещенных в углах спинок.

Чтобы снять: Одновременно освободите два красных фиксатора по углам кровати и поднимите спинку (рис. 2d)

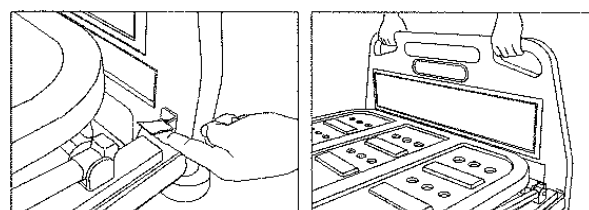


2d


Чтобы установить: Оставьте в открытом положении два красных фиксатора (рис. 2a), потом вставьте спинку так, как показано на рисунке (2b) и защелкните фиксаторы вниз (2c)

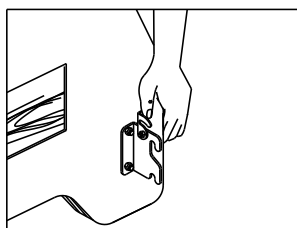

2a

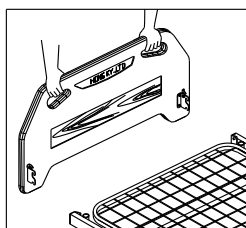

2b

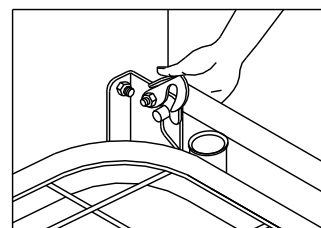

2c


4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

К использованию ПРОВЕРЬТЕ работу подвижных частей кровати. УБЕДИТЕСЬ в надлежащей фиксации всех частей кровати. Применяйте мягкий детергент и теплую воду для обработки изделия. ИЗБЕГАЙТЕ попадания влаги к электромотору.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все металлические части кровати окрашены или хромированы с целью повышения устойчивости конструкции к коррозии и для легкой гигиенической обработки. Необходимо минимум раз в год проводить обзор всех компонентов изделия на наличие повреждений.

6. ВНИМАНИЕ!

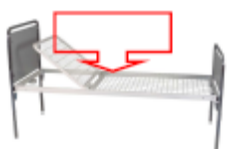

Не превышайте максимальную нагрузку на кровать в 200 кг. Предотвращайте попадание частей тела на подвижные части кровати; остерегайтесь защемления пальцев и т.д. Не крутите ручку регулировки угла наклона секции, если чувствуете значительную (избыточную) нагрузку.

Виробник: HONG KY CO., LTD.
BINH CHUAN PRODUCTION ZONE 72000, BINH
DUONG PROVINCE, VIETNAM
Імпортёр: ТОВ "ОСД Східна Європа",
м. Київ osd.import@gmail.com

СР	№9405/2010
	24.03.2010

7. ГАРАНТИЯ



Условия гарантии:

ООО «ОСД Восточная Европа» гарантирует отсутствие заводских дефектов и работу устройства в течение гарантийного периода 12 месяцев с даты покупки при соблюдении правил эксплуатации изделия изложенных в инструкции.

1. Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока.

2. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- а) нарушение правил эксплуатации, изложенных в инструкции.
- б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия)
- в) если устройство использовался не по назначению

3. Гарантия не распространяется на:

- а) механические повреждения или повреждения вследствие транспортировки.
- б) повреждения, вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей.
- в) повреждения, вызванные бытовыми факторами, внешними действиями (перепады напряжения в сети), неправильное подключение устройства.

4. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки.

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Дата продажи _____

Подпись _____