

**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОМОТОРОМ
OSD-91+OSD-90V**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Спасибо, что отдали предпочтение нашей продукции.

Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и придерживайтесь ее во время использования изделия.



Это изделие соответствует стандарту европейской Директивы 93/42/EEC



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте кровать, не ознакомившись с инструкцией

СОДЕРЖАНИЕ


- 1. Описания**
- 2. Технические характеристики**
- 3. Инструкция**
- 4. Общие указания**
- 5. Обслуживание**
- 6. Предупреждение**
- 7. Гарантия**

1. ОПИСАНИЕ

Кровать OSD-91V принадлежит к 1-му классу медицинских изделий; используется для пациентов в больницах, а также в домашних условиях. Конструкция кровати состоит из металлической рамы, головной и ножной секций, электрического мотора и пульта дистанционного управления. В стандартном комплекте прилагаются ножки с колесами и тормозами (4 шт.). Пульт управления позволяет регулировать угол наклона головной и ножной секции, что обеспечивает максимальный комфорт пациенту и персоналу. Кровать выкрашена в бежевый цвет, боковые спинки украшены кремовыми металлическими панелями бежевого цвета. Дополнительно кровать со стороны главной секции можно комплектовать надкроватной трапецией; ножки можно оборудовать колесами с тормозами; также можно комплектовать по желанию клиента универсальными перилами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка: 120 кг

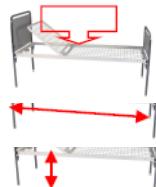


Длина матрасной базы: 200 см

Общая длина: 205 см

Высота: 85 см

Высота от пола: 51 см

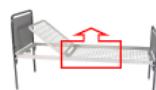

Вес кровати: 34 кг

Цвет: бежевый



Угол наклона головной секции: 60°

Угол наклона ножной секции: 40°

3. ИНСТРУКЦИЯ

Кровать доставляется в разобранном виде. Сборка и настройка медицинского кровати не требуют особых навыков или знаний, специального инструмента. Чтобы собрать кровать необходимо выполнить следующие действия:

1. Распакуйте все комплектующие кровати
2. Подготовьте место для расположения кровати
3. Подключите длинную боковую спинку к главной секции кровати, короче спинку подключите к ножной секции.

Остерегайтесь защемления пальцев!

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

К использованию ПРОВЕРЬТЕ работу подвижных частей кровати. УБЕДИТЕСЬ в надлежащей фиксации всех частей кровати. Применяйте мягкий детергент и теплую воду для обработки изделия. ИЗБЕГАЙТЕ попадания влаги к электромотору.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все металлические части кровати медицинской функциональной OSD-91 окрашены или хромированы с целью повышения устойчивости конструкции к коррозии и для легкой гигиенической обработки. Необходимо минимум раз в год проводить обзор всех компонентов изделия на наличие повреждений.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превышайте максимальную нагрузку на кровать 120 кг. Предотвращайте попадание частей тела на подвижные части кровати; остерегайтесь защемления пальцев и т.д. Не крутите ручку регулировки угла наклона секции, если чувствуете значительную (избыточную) нагрузку.

Виробник: HONG KY CO., LTD.
BINH CHUAN PRODUCTION
ZONE 7200, BINH DUONG
PROVINCE, VIETNAM
Імпортер: ТОВ “ОСД Східна Европа”, м. Київ

osd.import@gmail.com

CP	9405/2010
	24.03.2010

7. ГАРАНТИЯ



Условия гарантии:

ООО “ОСД Восточная Европа ” гарантирует отсутствие заводских дефектов и работу устройства в течение гарантийного периода 12 месяцев с даты покупки при соблюдении правил эксплуатации изделия изложенных в инструкции.

- 1.Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока.
- 2.Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - а)нарушение правил эксплуатации, изложенных в инструкции.
 - б)при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия)
 - в)если устройство использовался не по назначению
- 3.гарантия не распространяется на:

- а) механические повреждения или повреждения вследствие транспортировки.
- б) повреждения, вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей.
- в) повреждения, вызванные бытовыми факторами, внешними действиями (перепады напряжения в сети), неправильное подключение устройства.

4. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки.

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Дата продажи _____

Подпись _____