

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ OSD-93 и OSD-94

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Спасибо, что отдали предпочтение нашей продукции.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и придерживайтесь ее во время использования изделия.

Это изделие соответствует стандарту европейской Директивы 93/42/ЕЕС

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте кровать, не ознакомившись с инструкцией

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание
2. Технические характеристики
3. Инструкция
4. Общие указания
5. Обслуживание
6. Предупреждение
7. Гарантия

ОПИСАНИЕ

Кровати медицинские функциональные OSD-93 и OSD-94 принадлежат к 1-му классу медицинских изделий; используются для пациентов в больницах, а также в домашних условиях.

Конструкция кровати состоит из металлической рамы, головной и ножной секций (только серия 94), ручек для регулирования.

Ручки управления позволяют регулировать угол наклона головной и ножной секции, обеспечивает максимальный комфорт пациенту и персонала.

Кровать выкрашена в бежевый цвет, боковые спинки украшены металлическими панелями бежевого цвета.

Дополнительно кровать со стороны головной секции можно комплектовать надкроватьной трапецией; ножки можно оборудовать колесами с тормозами; также можно комплектовать по желанию клиента универсальными перилами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка: 120 кг

Длина матрасной базы: 200 см

Общая длина 205 см

Высота: 85 см

Высота от пола: 51 см

Ширина матрасной базы: 85 см

Общая ширина: 90 см

Вес кровати: 37 кг

Цвет: бежевый

Угол наклона головной секции: 60°

Угол наклона ножной секции: 40°

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превышайте максимальную нагрузку на кровать 120 кг.

Предотвращайте попадание частей тела на подвижные части кровати;
остерегайтесь защемления пальцев и т.д.

Не крутите ручку регулиции угла наклона секции, если чувствуете значительную (избыточную) нагрузку.

3. ИНСТРУКЦИЯ

Кровать доставляется в разобранном виде. Сборка и настройка медицинской кровати не требуют особых навыков или знаний, специального инструмента. Чтобы собрать кровать, необходимо выполнить следующие действия:

1. Распакуйте все комплектующие кровати
2. Подготовьте место для расположения кровати
3. Подключите длинную боковую спинку к главной секции кровати, короче спинку подключите к ножной секции.

Остерегайтесь защемления пальцев!

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

К использованию ПРОВЕРЬТЕ работу подвижных частей кровати. УБЕДИТЕСЬ в надлежащей фиксации всех частей кровати. Применяйте мягкий детергент и теплую воду для обработки изделия. ИЗБЕГАЙТЕ длительного контакта влаги кровати с металлическими частями

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все металлические части кровати OSD-93 и OSD-94 окрашены или хромированы с целью повышения устойчивости конструкции к коррозии и для легкой гигиенической обработки. Необходимо минимум раз в год проводить осмотр всех компонентов изделия на наличие повреждений.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

ООО "ОСД Восточная Европа" гарантирует отсутствие заводских дефектов и работу устройства в течение гарантийного срока 12 месяцев с даты покупки при соблюдении правил эксплуатации изделия изложенных в инструкции.

1. Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока.

2. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

а) нарушение правил эксплуатации, изложенных в инструкции.

б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия)

в) если устройство использовался не по назначению

3. Гарантия не распространяется на:

а) механические повреждения или повреждения вследствие транспортировки.

б) повреждения, вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей.

в) повреждения, вызванные бытовыми факторами, внешними действиями (перепады напряжения в сети), неправильное подключение устройства.

4. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки.

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

ДАТА _____

ПОДПИСЬ/ПЕЧАТЬ _____