

**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
СЕРИЯ OSD-94V**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**



Спасибо, что отдали предпочтение нашей продукции.  
Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и придерживайтесь ее во время использования изделия.



**Это изделие соответствует стандарту европейской Директивы 93/42/ЕЕС**



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Не используйте кровать, не ознакомившись с инструкцией**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

- 1. Описания**
- 2. Технические характеристики**
- 3. Инструкция**
- 4. Общие указания**
- 5. Обслуживание**
- 6. Предупреждение**
- 7. Гарантия**

### **1. ОПИСАНИЕ**

Кровать OSD-91V принадлежит к 1-му классу медицинских изделий; используется для пациентов в больницах, а также в домашних условиях. Конструкция кровати состоит из металлической рамы, головной и ножной секций, электрического мотора и пульта дистанционного управления. Пульт управления позволяет регулировать угол наклона головной и ножной секции, что обеспечивает максимальный комфорт пациенту и персоналу. Кровать выкрашена в бежевый цвет, боковые спинки украшены кремовыми металлическими панелями бежевого цвета. Дополнительно кровать со стороны главной секции можно комплектовать надкроватной трапецией; ножки можно оборудовать колесами с тормозами; также можно комплектовать по желанию клиента универсальными перилами.

### **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Максимальная нагрузка: 120 кг

Длина матрасной базы: 200 см

Общая длина: 205 см

Высота: 85 см

Высота от пола: 51 см

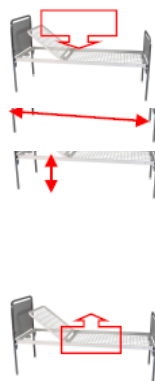

Вес кровати: 34 кг

Цвет: бежевый

Угол наклона головной секции: 60°



Угол наклона ножной секции: 40°

### 3. ИНСТРУКЦИЯ

Кровать доставляется в разобранном виде. Сборка и настройка медицинской кровати не требуют особых навыков или знаний, специального инструмента. Чтобы собрать кровать необходимо выполнить следующие действия:

1. Распакуйте все комплектующие кровати
2. Подготовьте место для расположения кровати
3. Подключите длинную боковую спинку к главной секции кровати, короче спинку подключите к ножной секции.

Остерегайтесь защемления пальцев!

### 4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

К использованию ПРОВЕРЬТЕ работу подвижных частей кровати. УБЕДИТЕСЬ в надлежащей фиксации всех частей кровати. Применяйте мягкий детергент и теплую воду для обработки изделия. ИЗБЕГАЙТЕ попадания влаги к электромотору.

### 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все металлические части кровати медицинской функциональной OSD-91 окрашены или хромированы с целью повышения устойчивости конструкции к коррозии и для легкой гигиенической обработки.

Необходимо минимум раз в год проводить обзор всех компонентов изделия на наличие повреждений.

### 6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превышайте максимальную нагрузку на кровать 120 кг. Предотвращайте попадание частей тела на подвижные части кровати; остерегайтесь защемления пальцев и т.д. Не крутите ручку регулировки угла наклона секции, если чувствуете значительную (избыточную) нагрузку.

Виробник: HONG KY CO., LTD.  
BINH CHUAN PRODUCTION  
ZONE 7200, BINH DUONG  
PROVINCE, VIETNAM  
Імпортёр: ТОВ "ОСД Східна  
Європа", м. Київ

[osd.import@gmail.com](mailto:osd.import@gmail.com)

[osd.com](http://osd.com)

CP	9405/2010
	24.03.2010

### 7. ГАРАНТИЯ



**Условия гарантии:**

ООО "ОСД Восточная Европа" гарантирует отсутствие заводских дефектов и работу устройства в течение гарантийного периода 12 месяцев с даты покупки при соблюдении правил эксплуатации изделия изложенных в инструкции.

1. Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока.

2. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

а) нарушение правил эксплуатации, изложенных в инструкции.

б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия)

в) если устройство использовался не по назначению

3. Гарантия не распространяется на:

а) механические повреждения или повреждения вследствие транспортировки.

б) повреждения, вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей.

в) повреждения, вызванные бытовыми факторами, внешними действиями (перепады напряжения в сети), неправильное подключение устройства.

4. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки.

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

**Дата продажи**\_\_\_\_\_

**Подпись**\_\_\_\_\_