

НАДКРОВАТНАЯ ТРАПЕЦИЯ С БАЗОЙ

OSD-97



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Данное изделие соответствует D.Lgs 46/97 согласно европейской Директиве 93/42/ЕЕС.

Виробник: HONG KY CO., LTD.
BINH CHUAN PRODUCTION
ZONE 7200, BINH DUONG
PROVINCE, VIETNAM
Імпортер: ТОВ "ОСД Східна
Європа", м. Київ

[osd.import@gmail.c](mailto:osd.import@gmail.com)

[om](http://osd.com)

CP	9405/2010
	24.03.2010

Мы признательны вам за приобретение нашего изделия. Вся наша продукция спроектирована и изготовлена из материалов наивысшего качества, чтобы предложить максимальный комфорт и безопасность пользователю.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
- ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В СЛУЧАЕ ИЗНОСА ИЛИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 70КГ. НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЭТОТ ЛИМИТ.

- Изделие готово к эксплуатации, не требует какого-либо технического вмешательства или дополнительной модернизации.
- Периодически осматривайте изделие на наличие видимых повреждений.
- В случае необходимости специфического технического вмешательства обратитесь к вашему дилеру. Дальнейшая эксплуатация изделия возможна только после устранения всех неполадок.
- До начала эксплуатации изделия убедитесь, что база расположена устойчиво на поверхности пола; трапеция закреплена правильно и надежно.
- При установке и регулировке прикроватной трапеции остерегайтесь зажима пальцев рук!

ВНИМАНИЕ: параметры и иллюстрации изделия, предоставленные в этом руководстве приблизительные, могут незначительно отклоняться от действительных. Производитель оставляет за собой право корректировать изделие без уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
3. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
4. СБОРКА
5. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
6. ГАРАНТИЯ
7. ДИРЕКТИВА 93/42 СЕЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. ОПИСАНИЕ

Прикроватная трапеция с базой OSD-97-C состоит из разбирающейся базы и непосредственно надкроватной трапеции. Изделие полностью разбирается, компактно складывается; удобно для транспортировки, хранения и перемещения.

Изделие используется пациентами находящимся на постельном режиме, в длительном лежачем состоянии при необходимости приподняться или сесть на кровати. Если надобности нет «гусь» с трапецией может легко отсоединяться.

Комплектующие:

Крепление треугольника и треугольник


Верхняя секция «гуся»

Основа «гуся»

Нижняя часть «гуся»

«П»-образная основа базы

Крепление базы

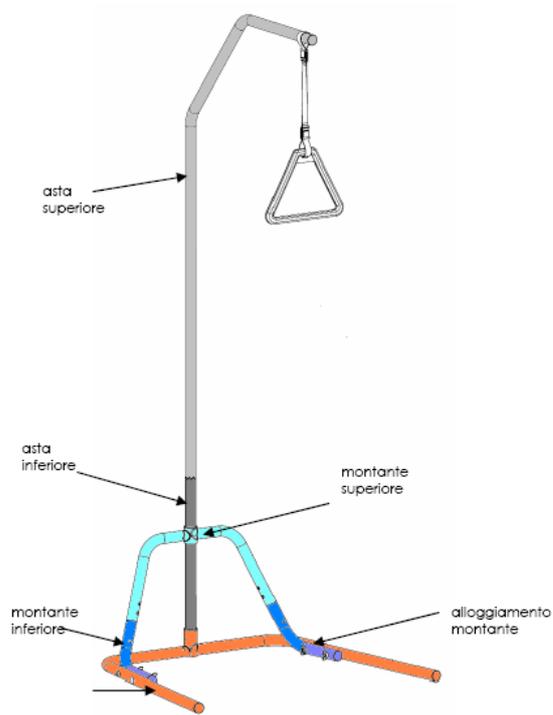

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ширина базы:	71 см
Глубина базы:	74 см
Высота базы:	42 см
Расстояние трапеции до пола:	95/130 см
Вес:	13 кг
Макс. высота «гуся»:	192 см
Глубина «гуся»:	74 см
Длина крепления треугольника:	45 см
Макс. допустимая нагрузка:	70 кг

Особенности

Металлическая рама с покраской.

Широкая металлическая база для надежной устойчивости.


3. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Размещать прикроватную трапецию с базой следует у изголовья кровати. Чтоб приподняться на кровати пациенту необходимо всего лишь ухватиться за треугольник и подтянуться. Верхняя часть «гуся» может поворачиваться на 90° над кроватью – во время проведения процедур либо за отсутствием необходимости.


При эксплуатации прикроватной трапеции с базой пациенту может понадобиться помощь ассистента, что значительно облегчит и обезопасит его действия и движения.

4. СБОРКА


1. Прежде всего, вам необходимо собрать крепление базы, состоящее из трех частей (верхней и двух нижних). Убедитесь, что части соединены и зафиксированы прочно.

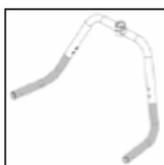

2. Вставьте нижние части крепления базы в отверстия «п»-образной основы базы, как показано на рисунке

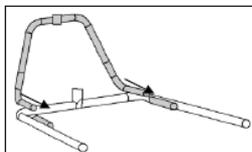

3. Вставьте нижнюю часть «гуся» в крепление базы и отверстие в «п»-образной основе базы.

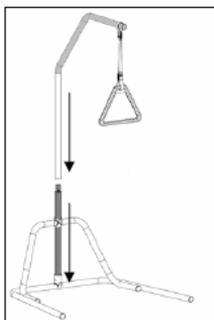

4. Соедините верхнюю часть «гуся» с треугольником и среднюю часть «гуся», зафиксируйте защелку. Соедините полученную конструкцию с базой надкроватной трапеции.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Прикроватная трапеция с базой OSD-97-С не требует каких-либо специфических методов технического обслуживания. Рекомендуем чистку и уход за изделием производить с помощью мягкого сухого ветоша. В случае необходимости изделие можно мыть водой с использованием мягких моющих средств. Не применяйте растворители и абразивные вещества. Размещайте прикроватную трапецию в сухом месте, подальше от влаги.

Периодически тщательно осматривайте изделие на наличие поломок или повреждений. В случае обнаружения технических неполадок НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие. При перемещении прикроватной трапедии с базой проверяйте ее устойчивость.

6. ГАРАНТИЯ

1. Гарантийный ремонт проводится только в течении гарантийного срока.

2. Изделие снимается с гарантии только в следующих случаях:

- а) нарушение правил эксплуатации изложенных в инструкции;
- б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия);
- в) если изделие используется не по назначению;

3. Гарантия не распространяется на:

- а) механические повреждения или повреждения в результате транспортировки;
- б) повреждения вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- в) неисправности, вызванные бытовыми факторами (перепад напряжения в сети) или в результате неправильного подключения к сети.

3. Товар обмену подлежит только в случае неисправности.

Дата продажи _____

МП _____