

ОТКИДНЫЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ КРОВАТИ OSD-98 (металлические) OSD-98A (алюминиевые)

РУКОВДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Это изделие соответствует стандарту европейской Директиве 93/42/ЕЕС

Виробник: HONG KY CO., LTD. BINH CHUAN PRODUCTION ZONE 7200, BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM Імпортер: ТОВ "ОСД Східна Європа", м. Київ

osd.import@gmail.c

om

CP 9405/2010 24.03.2010

СОДЕРЖАНИЕ

| Предостережения | 2 |
|---------------------------|---|
| Описание | 2 |
| Техническое описание | 2 |
| Рекомендации по установке | 3 |
| Базовые рекомендации | 3 |
| Технический уход | 6 |
| Гарантия | 7 |

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ НСТРУКЦИЮ.
- Максимальная нагрузка 50 кг.
- Изделие готово к эксплуатации, не требует какого-либо технического вмешательства или дополнительной модернизации.
- ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО УСТРОЙСТВО НАХОДИТЬСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В СЛУЧАЕ ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- В случае использования изделия разными пациентами рекомендуется систематически тщательно мыть и дезинфицировать его во избежание перекрестных инфекций.

2. ОПИСАНИЕ

Откидные поручни для кровати OSD-98 и OSD-98A принадлежат к 1-у классу медицинских изделий, используются в больницах для предотвращения падения пациента с кровати. Поручни изготовлены из металла (OSD-98) или алюминия (OSD-98A), оснащены 4 эргономическими креплениями для более прочной и надежной фиксации; легко фиксируются на кровати и быстро снимаются.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Максимально допустимый вес для обоих моделей поручней: 50 кг

OSD-98 (хромированный металл) OSD-98A (алюминий)

Высота: 43 см Высота: 43 см

Длина: 163 см (без креплений) Длина: 163 см (без креплений)

198 см (с креплениями)

Вес: 5,80 кг Вес: 3 кг

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

198 см (с креплениями)

Зацепите оба крепления за стойку кровати с одной стороны поручня. С другой стороны оттяните крепления, зафиксируйте на кровати на нужной высоте.

5. БАЗОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРИ УСТАНОВКЕ-СЪЕМЕ ПОРУЧНЕЙ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ИЗБЕГАЙТЕ ЗАЖИМА ПАЛЬЦЕВ РУК!

НЕ ОПИРАЙТЕСЬ НА ПОРУЧНИ КРОВАТИ! Превышение максимально допустимой нагрузки может привести к поломке поручня и, вследствие, травмировать пользователя.

6. ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД

Мойку производить теплой водой и мягким моющим средством.

Изделие следует осматривать не менее одного раза в 12 месяцев. Этот осмотр должен состоять из визуальной проверки всех компонентов поручня на отсутствие видимых повреждений, проверки всех креплений и болтов.

ВНИМАНИЕ: В случае необходимости специфического технического вмешательства обратитесь к вашему дилеру. Дальнейшая эксплуатация поручней возможна только после устранения всех неполадок.

По окончанию срока эксплуатации съемные поручни для кровати OSD необходимо утилизировать согласно действующему законодательству Украины.

7. ГАРАНТИЯ

- 1. Гарантийный ремонт проводиться только в течении гарантийного срока.
- 2. Изделие снимается с гарантии только в следующих случаях:
- а) нарушение правил эксплуатации изложенных в инструкции;
- б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия);
- в) если изделие используется не по назначению;
- 3. Гарантия не распространяется на:
- а) механические повреждения или повреждения в результате транспортировки;
- б) повреждения вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- в) неисправности, вызванные бытовыми факторами (перепад напряжения в сети) или в результате неправильного подключения к сети.
- 3. Товар обмену подлежит только в случае неисправности.

| Дата продажи | МП |
|--------------|----|