



CANOO V



ВІТАЄМО!

Купуючи цей масажер, ви продемонстрували уважність до здоров'я.

Щоб ви могли довго користуватися перевагами цього пристрою, ми просимо вас уважно прочитати та дотримуватися інструкцій з безпеки.

Сподіваємось, вам сподобається ваш персональний Canoo V.

З моменту свого заснування в 2000 році ім'я CASADA означає високоякісні продукти в області оздоровлення та фітнесу.

Сьогодні пристрой CASADA доступні в 37 країнах світу. Продукцію CASADA, а також надійність і відмінну якість характеризують безперервний розвиток, характерний дизайн і сурова спрямованість на підвищення якості життя.

Інструкції з техніки безпеки



I. НАСТУПНІ ОСОБИ ПОВИННІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРІЙ ЛІШЕ ПІСЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ЛІКАРЕМ:





- Люди, які легко піддаються впливу електромагнітних хвиль, наприклад користувачі кардіостимулаторів або подібних пристрій.
- Люди, які страждають на злокісну пухлину.
- Людям із захворюваннями серця.
- Жінки під час менструації, відразу після пологів і під час вагітності.
- Люди, які страждають на діабет і тому мають обмежені сенсорні здібності.
- Люди з ушкодженнями шкіри в зоні масажу.
- Люди з температурою тіла вище 38 градусів (лихоманка).
- Особи, які страждають на гострі запалення/травми на пізніх стадіях (з такими симптомами, як втома, ознооб, нестабільний артеріальний тиск тощо)
- Люди, які страждають від сильного виснаження.
- Люди, які страждають на остеопороз, забиття або розтягнення м'язів, переломи тощо.
- Люди, чутливі до болю та тепла.
- Люди, які не можуть свідомо рухати ногами та стопами.
- Людям, чиї стопи менше 21 см, не слід використовувати його.
- Людям, які не можуть чітко висловлювати свої думки, і людям, які не можуть або мають обмежені рухи, не слід використовувати пристрій.
- Людям, яким лікар заборонив робити масаж, не рекомендується.
- Люди з тромбозом, важкою аневризмою, гострою аневризмою вен, всілякими висипаннями та шкірними захворюваннями тощо.

II. ВИКОРИСТОВУЮЧІ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАСТУПНЕ:


- Використовуйте ЛІШЕ вилку, що входить у комплект. (Інші вилки можуть призвести до ураження електричним струмом, виходу з ладу пристрою або пожежі).
- Перед використанням переконайтесь, що тканинний чохол ніде не пошкоджений. Якщо ви виявите отвір, припиніть його використовувати та негайно відправте пристрій на ремонт.
- Перш ніж змінити кут нахилу пристрою, переконайтесь, що поблизу від вас немає людей, тварин або інших перешкод. Е ризик застрагти.
- Після використання вилку необхідно витягнути з розетки, а пристрій зберігати та закріплювати таким чином, щоб маленькі діти чи домашні тварини не могли поранити ним.
- Під час використання не сідайте на рухомий стілець, який може, наприклад, котитися. Це вбереже вас від травми рухомим стільцем.
- Не обмотуйте шнур живлення навколо пристрою.
- Неналежне поводження з шнуром живлення та його застосування можуть призвести до пошкодження та призвести до пожежі, ураження електричним струмом тощо.
- Ні кому, крім призначеного технічного персоналу, не дозволяється вносити зміни, модифікувати або ремонтувати цей продукт. Це автоматично призводить до втрати гарантії.
- Будь ласка, переконайтесь, що вилка живлення вимкнена під час чищення. Крім того, ви не повинні мати мокрі руки, коли вимкнете вилку з розетки. Це може призвести до серйозних аварій.
- Якщо під час використання ви відчули себе погано, негайно припиніть його використання.
- Тривалість масажу не повинна перевищувати 2 x 30 хвилин на кожну частину тіла на день. Організм також повинен мати можливість відновлюватися після масажу.

Інструкції з техніки безпеки

- Виймаючи вилку з розетки, не тягніть за кabel. Витягніть вилку. Ви також повинні регулярно очищати пил на вилці.
- Якщо ви знову користуєтесь пристрієм після тривалої перерви, спочатку переконайтесь, що пристрій працює нормально і чи в порядку кабель живлення. Також його слід регулярно очищати від пилу.
- Зберігайте пристрій у сухому місці. Пил або волога, що залишаються на пристрії протягом тривалого часу, можуть спричинити ураження електричним струмом, пошкодження або пожежі.
- Цей масажер призначений тільки для масажу ніг і стоп. Будь ласка, не використовуйте його для масажу голови, грудей, живота, колін, ліктів і подібних частин тіла.
- Не тягніть за кabel контролера та не розгойдуйте контролер на власному кабелі. Це може легко привести до пошкодження кабелю.
- Не дозволяйте дітям користуватися ним і не підпускайте дітей до пристроя під час його використання.
- Будь ласка, не сідайте і не стійте на пристрії. Це може призвести до пошкоджень і нещасних випадків.
- Будь ласка, не наступайте на масажер занадто сильно.
- Не просовуйте руки чи пальці в щілину між підлогою та боковою стінкою всередині машини. Під час регулювання кута машини або коли машина знаходитьться в розблокованому стані, існує ризик розчавлення.
- Будь ласка, не ставте ноги так, як показано на малюнку. (Це може легко спричинити нещасні випадки та травми.)
- Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити виробник, його служба обслуговування клієнтів або подібні заклади.
- Будь ласка, не пошкоджуйте, не змінійте, не тягніть, не перегинайте, не перев'язуйте та не перегинайте шнур живлення надмірно. (Це може пошкодити кабель і спричинити пожежу або ураження електричним струмом)
- Якщо шнур живлення або вилка пошкоджені або розетка несправна, не використовуйте пристрій. (Це може легко спричинити ураження електричним струмом, коротке замикання, пожежу чи подібні випадки)
- Будь-яким чином не допускайте контакту пристроя з рідинами.
- Будь ласка, не використовуйте пристрій одночасно з іншими електронними пристроями. (Це може призвести до проблем/перевантаження організму)
- Будь ласка, не використовуйте пристрій, якщо він загорнутий або накритий тканиною чи ковдрою (це може спричинити пожежу або підвищення внутрішньої температури).
- Не кладіть руки в щілини масажних голівок, є ризик травмування.
- Будь ласка, не використовуйте пристрій у ванній кімнаті або в місці з підвищеною вологістю.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник або роздрібний продавець, щоб уникнути подальшого пошкодження.

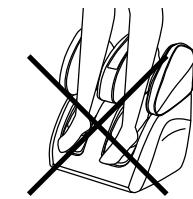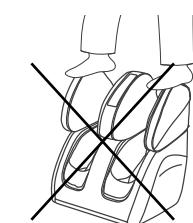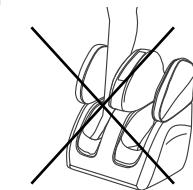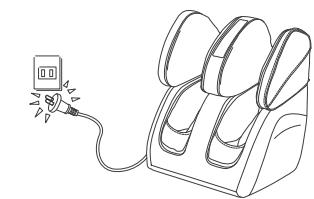


обладнання

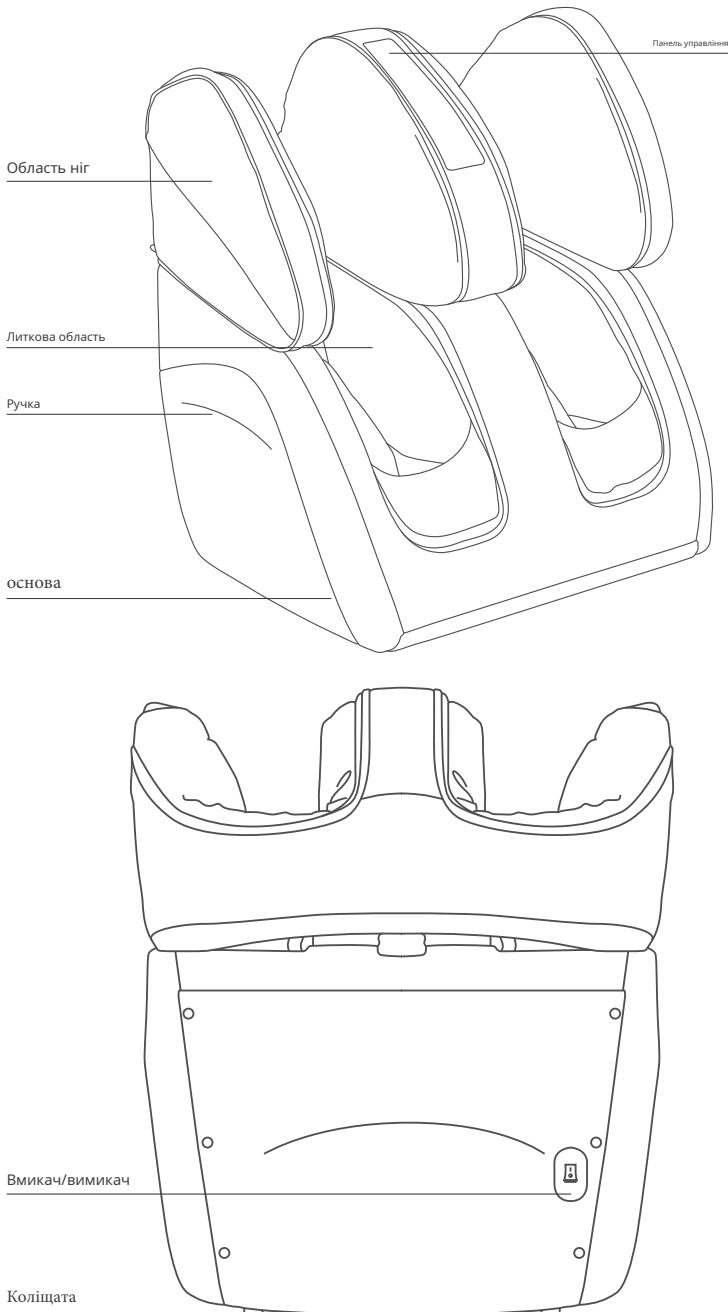


УСТАНОВКА

- Поставте масажер на рівну поверхню. Тримайтесь на відстані принаймні 1 метр від телевізорів, радіо та подібних аудіо/відео пристрій.
- Перед використанням необхідно перевірити, чи не пошкоджено тканинне покривля. Використання пристрою з пошкодженим тканинним покривлем може привести до ураження електричним струмом і травми.
- Повністю вставте вилку в розетку.
- Сядьте на диван, крісло тощо. Помістіть ноги в масажер. Відсуньте п'ята назад. Відрегулюйте потрібний кут на масажері.
- Регулювання області ніг: область верхньої частини ноги може бути відрегульована/витягнута для лікування області коліна або стегна.

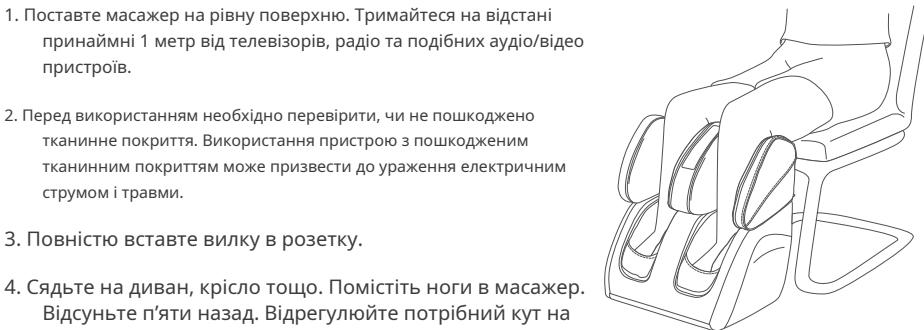


⚠ Будь ласка, не сідайте в крісло під час використання, це може привести до травми. Сядьте зручно та в природній позі.

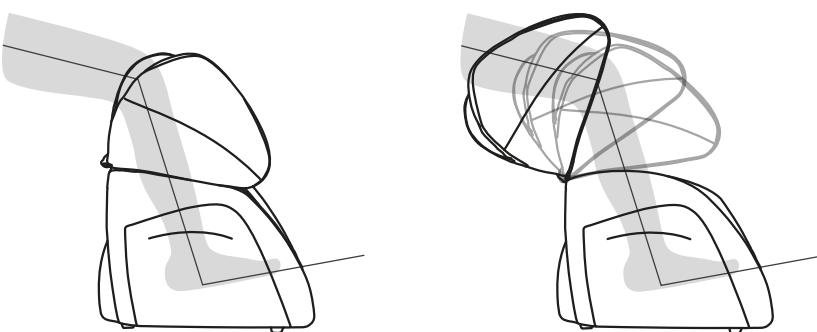

Рукою потягніть регульовану частину простору для ніг вгору. Кут можна регулювати відповідно до власних потреб.

Дистанційне керування

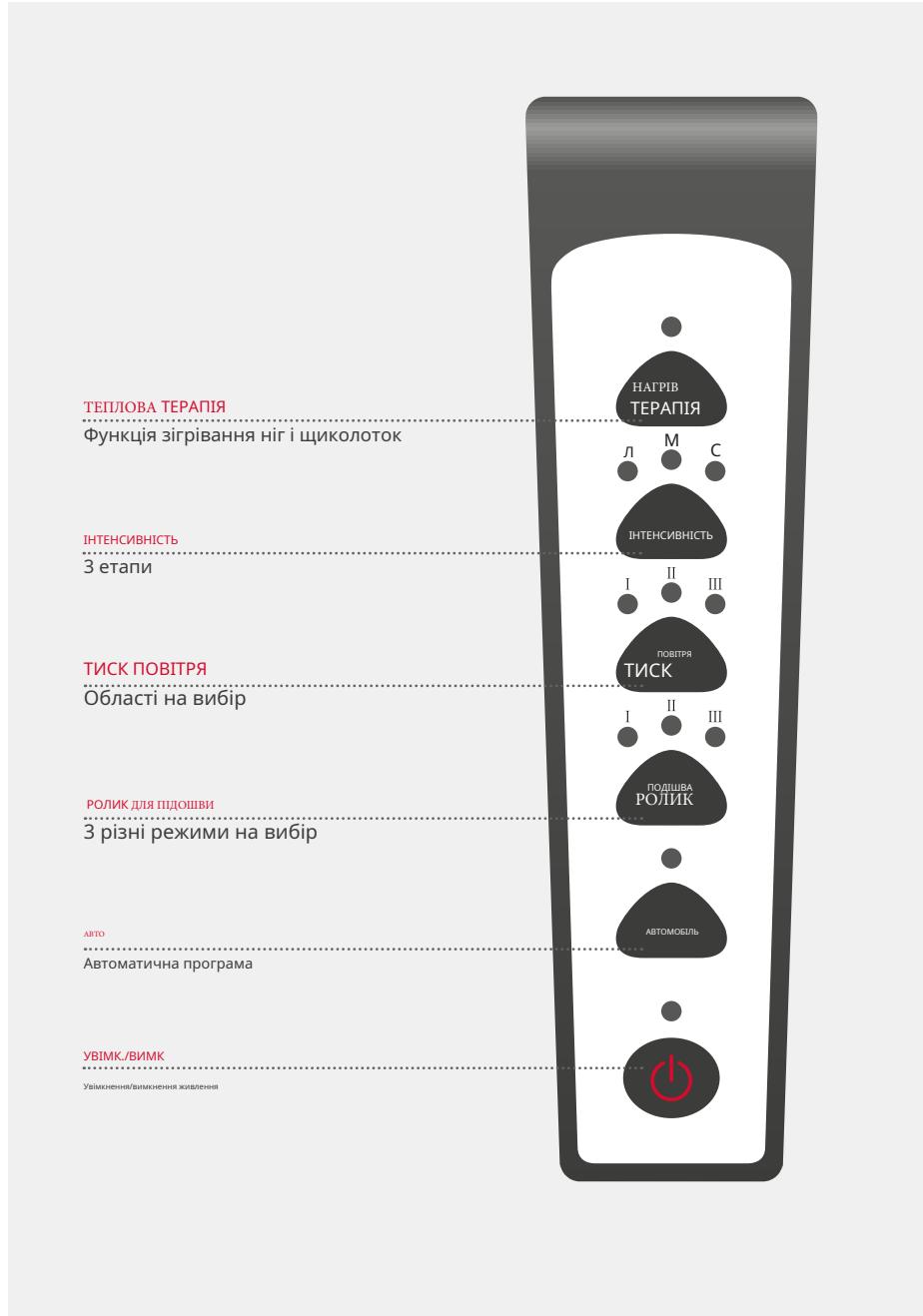

Особливості




ГУА ША

Зішкірб з легким натисканням відкриває поверхневі кровоносні судини і стимулює кровообіг. Гуаша часто використовується в поєднанні з акупресурою, щоб викликати додаткові стимули через «точки Шу», що призводить до полегшення симптомів.



ТОЧКИ АКУПРЕССУРИ

Масажуються важливі акупресурні точки (на стегнах, літках і щиколотках).

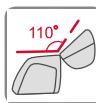

СТЕГНА

Верхня частина Canoo V, яку можна скласти до 110 градусів, дає вам можливість вибирати між точковим масажем колін і стегон.



ОПОРНИЙ КРОНШТЕЙН

Поворотний опорний кронштейн, прикріплений до передньої частини під пристроєм, дозволяє регулювати Canoo V під кутом 20 градусів.




ТРАНСПОРТНІ РОЛИКИ

Для зручності транспортування та розміщення Canoo V на задній частині пристрою прикріплено два коліщатка.



ТИСК ПОВІТРЯ

Подушки безпеки, які піднімаються та опускаються, викликають накачування, яке створює природні м'язові рефлекси. Особливо корисно в області літків і стоп.

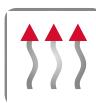

ТЕПЛО

Глибокий і зігріваючий ефект, який дозволяє ідеально розслабитися. Завдяки своєму глибокому впливу ця функція особливо корисна для м'язової напруги.



ЗОНИ ВІДБІТТЯ

Рефлексотерапія стоп відновлює м'язи стопи і надає гармонізуючу дію практично на всі органи тіла.




ПІШНІЙ СКУТЕР

Масаж стоп deluxe – навіть швидкість ролика для ніг регулюється.

Панель управління

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

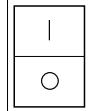кнопки	опис
	Блок живлення, включення/відключення
	Кнопка живлення При натисканні кнопки живлення загоряється індикатор і пристрій готовий до використання. Повторне натискання призведе до виходу з програмами. Зараз пристрій знаходиться в режимі очікування.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

кнопки	опис
	<p>АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА</p> <ul style="list-style-type: none"> • 44 масажних ролика різного розміру під підошвами ніг • 30 подушок безпеки, розподілених по стопах, літках, колінах або стегнах • Функцію обігріву можна вмикати/вимикати • Час роботи 15 хвилин <p>Залежно від ваших потреб тиск та інтенсивність повітря можна змінити або повністю вимкнути в режимі AUTO. Будь ласка, зверніть увагу, що функцію Intensity можна використовувати лише в поєднанні з Airpressure.</p> <p>Якщо ви залишите Airpressure та Intensity вимкненими в режимі AUTO, Canoo V здійснюватиме автоматичне керування лише для Sole Roller.</p> <p>Якщо ви активуєте функцію Sole Roller у режимі AUTO, програма AUTO перемикається безпосередньо в ручний режим.</p> <p>Світлодіодний індикатор показує, чи активована функція.</p>

Панель управління

РУЧНИЙ РЕЖИМ

Для ручного керування натисніть кнопку AUTO; індикатор згасне. Виберіть потрібні функції в різних комбінаціях або окремо. Зверніть увагу на рекомендовану тривалість 15 хвилин.

кнопки	опис
	<p>При натисканні цієї кнопки пристрій завжди перемикається на один з трьох варіантів масажу ніг GuaSha. 3 роликові шестерні по 4 рейки кожна. 2 з 4 роликами різного розміру кожен, 1 з 4 рейками та 3 різними роликами кожен (області: п'ята/середина/пальці)</p> <p>Світлодіодний індикатор показує, який варіант активовано. Щоб повністю вимкнути функцію, натисніть цю кнопку чотири рази.</p> <p>I → усі ролі постійно змінюються одночасно</p> <p>II → всі ролі з інтервалами 6 коротких, півобертів + 2 довгих, повних обертів</p> <p>III → всі ролі з інтервалами 5 коротких, півобертів + 2 довгих, повних обертів</p>
	<p>Виберіть між трьома різними варіантами повітряного масажу. Світлодіодний індикатор показує, який варіант активований. Щоб повністю вимкнути функцію, натисніть цю кнопку чотири рази.</p> <p>I → всі повітряні подушки</p> <p>II → Подушки безпеки для ніг</p> <p>III → Стегнові подушки</p>
	<p>Натискаючи цю кнопку, ви можете вибирати між трьома різними рівнями тиску повітря функції масажу повітряним тиском.</p> <p>Світлодіодний індикатор показує, яка сила активована. Щоб повністю вимкнути функцію, натисніть цю кнопку чотири рази.</p> <p>L → світло</p> <p>M → Середній</p> <p>C → Сильний</p>
	<p>Функцію обігріву подушок для стегон і циклоток можна вмикати/вимикати в АВТОМАТИЧНОМУ та ручному режимах. Ви також можете використовувати цю функцію без будь-якого масажу ніг або подушок.</p> <p>Зверніть увагу на рекомендований час роботи 15 хвилин. Світлодіодний індикатор показує, чи активована функція.</p>


Закінчення масажу

ПРИСТРІЙ БЕЗПЕКИ

Якщо на масажні ролики чинити занадто сильний тиск, вони перестануть рухатися. Якщо це сталося, будь ласка, від'єднайте шнур живлення, зачекайте 3 секунди та знову підключіть шнур живлення. Після цього ви зможете знову використовувати пристрій.

кнопки	опис
	Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб зупинити масаж.
	<p>Після використання прилад необхідно відключити від джерела живлення. Масажер необхідно повернути у вихідне положення та прибрати.</p> <p>Якщо ви не користуєтесь пристрієм протягом тривалого періоду часу, обов'язково від'єднайте його від мережі.</p>

Поверніть масажер у вихідне положення

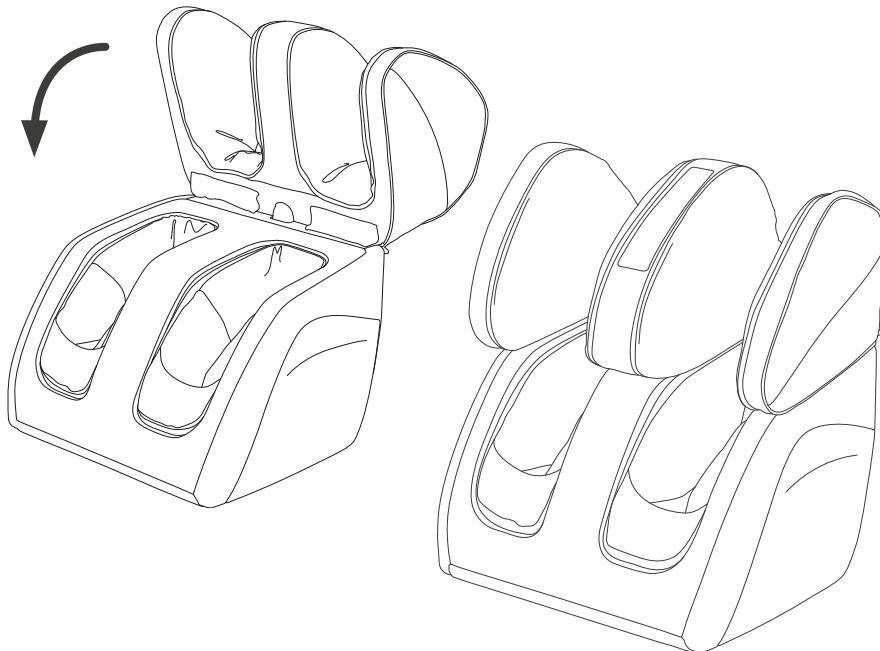

Догляд



- Під час технічного обслуговування та догляду необхідно витягнути вилку з розетки.
- Не торкайтесь вилки мокрими руками.
- Будь ласка, не використовуйте бензин, розчинник, відбілювач тощо. Це може привести до зміни кольору, деформації або пошкодження.
- Будь ласка, будьте обережні під час чищення тканини. Якщо матеріал пошкоджений, припиніть його використовувати. Зверніться до служби підтримки клієнтів, щоб уникнути травм.
- Будь ласка, НІКОЛИ не використовуйте пристрій без речовин!
- Коли тканину буде знято, не дозволяйте маленьким дітям мати доступ до пристрою, щоб уникнути нещасних випадків або травм.

- Використовуйте нейтральний миючий засіб із низькою концентрацією та м'яку тканину. Ви можете використовувати це для очищення пристрію. Зверніть увагу на низьку вологість!
- Натріть нею поверхню, а потім протріть сухою тканиною.
- Зняття та прання тканинного чохла:

- [1] Спочатку підтягніть регульовані частини області ніг
- [2] Знайдіть блискавку на тканинному чохлі.
- [3] Відкрийте його в напрямку стрілки та зніміть тканину.
- [4] Не використовуйте повторно випрану тканину, поки вона повністю не висохне.

