



< timetorelax

З моменту свого заснування в 2000 році ім'я CASADA асоціюється з високоякісною продукцією в сфері велнесу та фітнесу, і сьогодні прилади CASADA доступні по всьому світу. Безперервний розвиток, оригінальний дизайн і суворе орієнтація на поліпшення якості життя характеризують продукцію CASADA, а також її надійну і відмінну якість.

Вітаю!

Купуючи це масажне крісло, ви продемонстрували свою обізнаність про здоров'я. Для того, щоб ви могли насолоджуватися перевагами цього пристрою протягом тривалого часу, ми просимо вас уважно прочитати інструкцію з техніки безпеки і дотримуватися її,

Бажаємо Вам отримати багато задоволення від використання Вашого особистого масажного крісла **Sa-
phir** і сподіваємося, що Ви будете насолоджуватися його використанням протягом тривалого часу.

ЗМІСТ

1. Техніка безпеки	160
2. Найменування компонента виробу.....	166
Особливості.....	166
Пульт керування.....	167
3.Монтаж	168
4.Експлуатація продукту	172
5. Очищення / зберігання / технічне обслуговування	176
6. Усунення несправностей	178
7. Технічні характеристики	179
8. Спеціальні пропозиції	180
9. Декларація ЄС про відповідність	182
10.Гарантійні умови	182


1. Техніка безпеки

- Важливо прочитати ці інструкції з техніки безпеки перед використанням і використовувати цей продукт належним чином. Застереження в цьому описі, як розділити безпечно та правильно використовувати продукт, уникнути будь-якої шкоди продукту, користувачів чи інших людей.
- Цей запобіжний захід класифікується як Попередження та Застереження відповідно до серйозності небезпеки або пошкодження, які можуть бути спричинені неправильною експлуатацією. Це важливо і його необхідно.

 УВАГА	Неправильна експлуатація може призвести до серйозних травм користувача.
 Обережно	Неправильна експлуатація може призвести до травмування користувача та пошкодження майна. Майнова шкода стосується пов'язаної шкоди будинкам, майну, худобі, домашнім тваринам тощо.

	Цей символ означає попередження або увагу.
	Цей символ вказує на заборонений вміст. Картинку зліва заборонено розбирати.
	Цей символ вказує на обов'язковий або необхідний вміст.

- Після прочитання обов'язково збережіть інструкцію в місці, де користувач зможе її побачити в будь-який час.

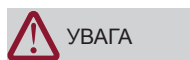

- Якщо з'являється дим або незвичайний звук (ненормальний стан), будь ласка, негайно від'єднайте живлення. Після підтвердження безпеки зверніться до дилера для ремонту. Щоб уникнути небезпеки, категорично заборонено ремонтувати самостійно.
- Вода в корпусі
- Сміття потрапляє в корпус
- Сильне падіння або пошкодження корпусу

1. Техніка безпеки



УВАГА

 аборонено	Забороняється користуватися масажним кріслом наступним людям. Тромбози (захворювання крові, токсична аневризма, гострий переворот вен), різні шкірні захворювання або шкірні інфекції (включаючи запалення підшкірної клітковини) тощо,
 Дотримуватись	• Хворим на цукровий діабет і порушеннями периферичного кровообігу, • Порушення сприйняття, • Особи з травмою в місці масажу, • Ті, у кого підвищена температура вище 38 °С, наприклад гостре запалення (черевний тиф, високий кров'яний тиск), • Ті, хто тяжко хворий і фізично слабкий, • Пацієнти з переломами та гострим болем у кістках • Пацієнти з розтягненням і запаленням м'язів. • Крім того, якщо ви почуваетесь погано або потребуєте тиші, використовуйте його з обережністю.
	Процедура масажу цим продуктом триватиме 15 хвилин. Будь ласка, уникайте постійного масажу однієї і тієї ж частини. Якщо вам потрібно продовжити його використання, зачекайте більше 30 хвилин, щоб уникнути надмірної стимуляції м'язів або нервової системи.

1. Техніка безпеки

 Без мокрих рук	Ніколи не використовуйте його, коли ваше тіло вологе, щоб уникнути ураження електричним струмом або виходу з ладу машини,
 Відсутня вологість	Цей продукт не можна занурювати у воду чи інші рідини, а також використовувати та зберігати у вологому середовищі, наприклад, ванній кімнаті, щоб уникнути ураження електричним струмом або механічної несправності,
 Потрібно слідувати	Увімкніть, коли переконаєтеся, що поблизу немає людей або домашніх тварин,

 Розбирання заборонено	Категорично забороняється самостійно розбирати або ремонтувати цей виріб, шнур живлення, пульт керування та інші компоненти, щоб уникнути ураження електричним струмом, пожежі чи поломки машини. Якщо шнур живлення пошкоджений, забороняється розбирати та замінювати його в приватному порядку, він повинен бути відремонтований або замінений виробником або кваліфікованими спеціалістами
 Заборонити	Не використовуйте пошкоджені шнури живлення. Не згинайте, не тягніть, не скручуйте та не пошкоджуйте шнур живлення та не вішайте на нього важкі предмети, використання пошкодженого шнура живлення може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання або пожежі

1. Техніка безпеки



УВАГА



Заборонити

Масажне крісло автоматично змінює свій кут під час автоматичної програми. Забороняється наближатися до будь-яких щілин і щілин, щоб уникнути травм.

Не використовуйте інші джерела живлення, окрім 220 В змінного струму. Шнур живлення не можна обмотувати навколо виробу, щоб уникнути ураження електричним струмом, короткого замикання або пожежі,

Не дозволяйте дітям кататися або гратися на цьому виробі, щоб уникнути травм або несправності машини.

Під час регулювання спинки стільця, сидіння та регулювання підйому ніг переконайтеся, що за спиною та під ніжкою немає інших людей, домашніх тварин або предметів. Щоб запобігти травмам, під час регулювання не кладіть жодну частину тіла, включаючи руки та ноги, в щілину між спинкою та сидінням, спинкою та підлокітником, підлокітником та плечем, сидінням та кришкою підлокітника.

1. Техніка безпеки

 Заборонити	Не використовуйте цей продукт голим, щоб уникнути пошкодження шкіри,
	Обов'язково використовуйте цей виріб відповідно до інструкцій, описаних у цьому посібнику, і не сідайте безпосередньо на ніжки чи частини підлокітників, щоб уникнути травм або нещасних випадків.
	Якщо кришку корпусу розібрано або пошкоджено, її не можна використовувати, щоб уникнути травм або нещасних випадків.

	Будь ласка, негайно вимкніть вимикач живлення та від'єднайте вилку живлення, коли він не використовується або коли живлення відключено, щоб уникнути витоку електричного струму, ураження електричним струмом або пожежі, коли живлення знову увімкнеться. Будь ласка, вимкніть головний вимикач живлення, якщо він не використовується протягом тривалого часу
	Щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтеся мокрими руками розетки, вилки або шнура живлення.
	Під час чищення та прибирання обов'язково вимкніть вимикач живлення та вийміть вилку з розетки, щоб уникнути пожежі чи ураження електричним струмом. Від'єднуючи вилку з розетки, не тягніть силою шнур живлення, а тримайте вилку, щоб уникнути нещасних випадків.
	Не використовуйте цей продукт відразу після їжі або пиття, щоб уникнути фізичного дискомфорту. • Не вішайте важкі предмети на шнур живлення або шнур керування, і ручний контролер не можна вдарити або впустити зовнішніми силами, щоб уникнути ненавмисної роботи, несправності, ураження електричним струмом або пожежі. Не використовуйте цей виріб поблизу джерел вогню або обігрівачів. • Не паліть під час використання, щоб уникнути пожежі.

1. Техніка безпеки



УВАГА



Цей продукт можна використовувати лише у звичайних побутових приміщеннях, будь ласка, не використовуйте його в інших місцях.

Не використовуйте цей виріб, якщо він накритий ковдрою або іншим, щоб запобігти підвищенню внутрішньої температури машини та пожежі.

Будь ласка, переконайтеся, що вилка та розетка добре підходять.

Не використовуйте монтажну плату, щоб уникнути ураження електричним струмом, короткого замикання або пожежі. Не стійте, не наступайте на корпус або ніжки машини та не складайте важкі предмети, щоб уникнути травм або поломки машини.

Не використовуйте цей виріб поблизу джерел вогню або легкозаймистих матеріалів, щоб уникнути деформації виробу, поломки машини або пожежі. Не використовуйте цей виріб у середовищі з високою концентрацією плаваючих хімікатів, таких як нафта та газ, щоб уникнути деформації виробу, відмови машини або пожежі.



Не розбризкуйте цей продукт органічними розчинниками, спиртом або пестицидами, щоб уникнути тріщин у машині, ураження електричним струмом або пожежі.

Під час використання не дозволяйте дітям або розумово відсталим підходити до машини, щоб уникнути травм.

Люди, які паралізовані, не можуть використовувати цей продукт, щоб уникнути фізичного дискомфорту або травм.


2. Назва компонента продукту

2.1. ОСОБЛИВОСТІ

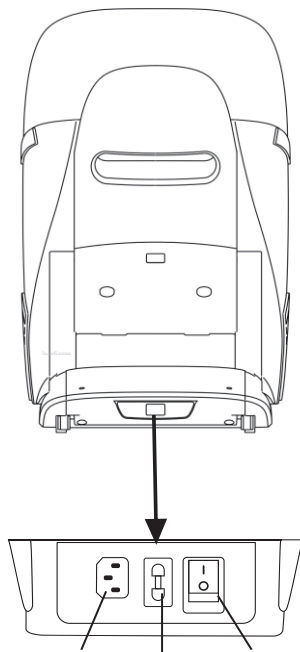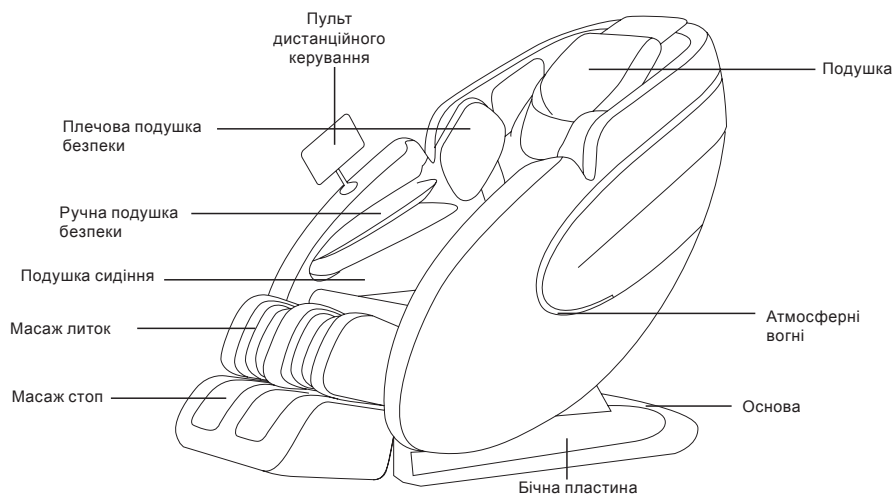


2. Назва компонента продукту

2.2. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

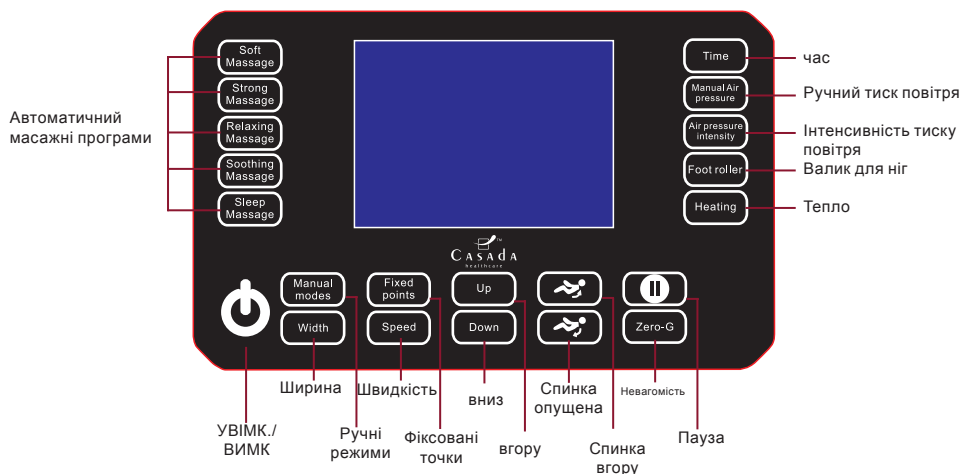

Збірка пульта

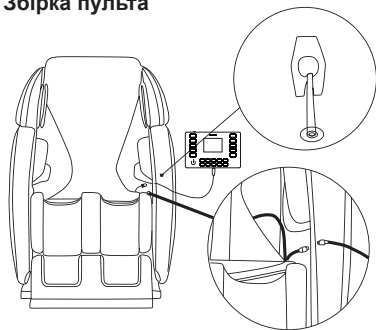

Перед використанням необхідно встановити пульт дистанційного керування. Переконайтеся, що джерело живлення **ВИМКНЕНО**, і виконайте наведені нижче дії.

1. Будь ласка, знайдіть тримач ручного контролера, упакований окремо з коробки.
2. Поставте тримач на лівий підлокотник і закрутіть його.
3. Під'єднайте та прикрутіть дроти постійного струму від тримача до проводів постійного струму від дисплея

частина.

* Не проливайте воду чи інші рідини на масажне крісло чи ручний пульт.

* Не встановлюйте його мокрими руками.

* Не сідайте на ручний контролер, не падайте і не топчіть його, не тягніть з силою дроти.

* Не натискайте на екран і панель гострими або твердими предметами. (Або це може завдати шкоди)


3. Монтаж

Підніміть зовнішню коробку вгору, зніміть кріпильну стійку та вийміть посібники з експлуатації, шнур живлення та інші аксесуари.



- Якщо ширина проходу менше 90 см, масажне крісло неможливо нормально пересувати.
- Якщо масажне крісло не можна нормально пересувати, зверніться до продавця, який продав його.
- Будь ласка, не кидайте масажне крісло під час входу та виходу через велику висоту масажного крісла.
- Будь ласка, не рухайте масажне крісло, коли на ньому знаходиться чоловік.
- Перш ніж переміщати масажне крісло, вийміть вилку з розетки. (Або вилка може бути пошкоджена, спричинити пожежу або ураження електричним струмом.)

3. Монтаж

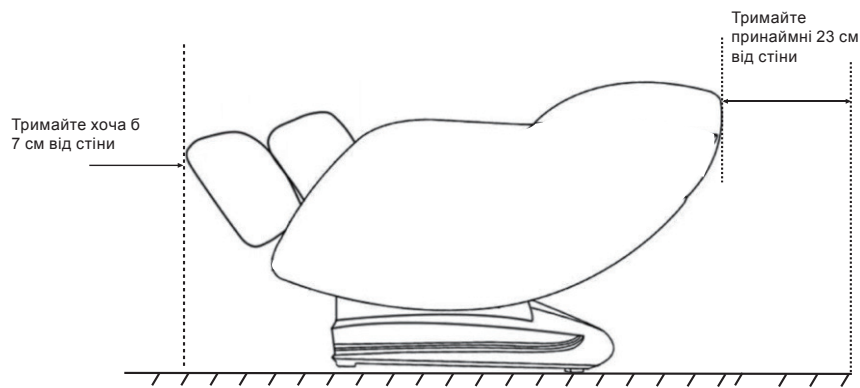

Вирішуючи, де поставити крісло, враховуйте наступне:

1. Розташуйте пристрій на рівній поверхні, подалі від прямих сонячних променів або інших прямих джерел тепла (щоб уникнути вицвітання).
2. Якщо ви бажаєте розмістити пристрій на твердій поверхні, рекомендується покласти шматок килима або м'який килимок під нею, щоб не пошкодити підлогу.
3. Щоб розмістити підставку для ніг у розгорнутому стані, переконайтеся, що місце на спинці крісла є вільним для мінімум 23 см.
4. Не використовуйте його в місцях з високою вологістю, таких як ванні кімнати або сауни.

3. Монтаж

1. Вставте Частину 1 у повітряний шланг згідно з рисунком 1.
2. Під'єднайте штекер і повітряний шланг підніжки до крісла, як показано на рисунку 2.
3. Вставте Частину 2 ззовні всередину у з'єднувальні елементи підніжки, як показано на рисунку 3.
4. Підніміть підніжку, вставте з'єднувальні елементи у відповідні пази, а потім вставте Частину 3 ззовні всередину у отвори (див. рисунок 4).
5. Тепер вставте Частину 4 в отвори Частини 3, щоб зафіксувати підніжку (див. рисунок 5).
6. З'єднайте блискавку крісла з блискавкою підніжки.

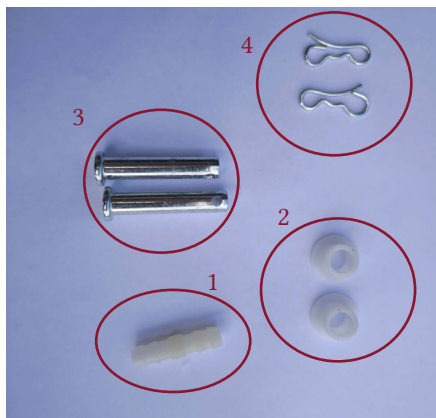


рисунок 1



3. Монтаж

рисунок 2



рисунок 3



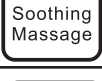
рисунок 4





рисунок 5



4. Експлуатація продукту

Кнопка	опис
	Коли джерело живлення підключено, спочатку натисніть його, щоб увімкнути крісло, і воно негайно запрацює в автоматичному режимі за замовчуванням у режимі «М'який масаж», а час роботи за замовчуванням становить 15 хвилин. Натисніть ще раз, щоб зупинити масаж, і крісло повернеться у вертикальне положення.
	Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути режим м'якого масажу. Режим м'якого масажу: Розслаблення напружених м'язів, помірна інтенсивність.
	Натисніть її, щоб увімкнути/вимкнути режим сильного масажу. Режим сильного масажу: Зняття болю в м'язах, сильна інтенсивність.
	Натисніть її, щоб увімкнути/вимкнути режим розслаблюючого масажу. Режим розслаблюючого масажу: підходить для масажу на дозвіллі, м'яка сила.
	Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути режим заспокійливого масажу. Режим заспокійливого масажу: Зняття болю в м'язах, помірна інтенсивність.
	Натисніть її, щоб увімкнути/вимкнути режим Sleep Massage. Режим масажу сну: сприяння кровообігу, м'яка сила.
	Натисніть її, щоб відрегулювати час масажу. Регульований час 10/20/30 хвилин.
	Натисніть, щоб увімкнути повітряну подушку для плеча, руки чи ноги. Коли на екрані світиться відповідний значок, це означає відкриття поточної подушки з повітряним масажем.
	Натисніть її, щоб переключити інтенсивність подушки на три рівні.
	Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути ролик масаж стоп.
	Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути/вимкнути функцію нагріву.
	Натисніть цю клавішу, щоб переключити ручні програми. Відповідно до вашого стану та часу масажу ви можете перемикаати розминання, постукування, режими постукування, натискання пальцями, синхронізація розминання та постукування, синхронізація розминання та постукування, стискання тощо

4. Експлуатація продукту

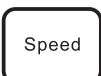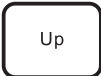
Taste	Beschreibung
 Width	У ручному режимі головки можна натиснути її, щоб налаштувати широкую, середню ширину та вузьку.
 Fixed point	Натисніть, щоб механізм залишався в будь-якому положенні під час масажу, натисніть ще раз, щоб дозволити механізму підніматися/опускатися, і натисніть втретє, щоб насолодитися масажем всього тіла..
 Speed	Натисніть її, щоб відрегулювати швидкість масажу. Є три рівні регулювання.
 Up	Натисніть і утримуйте її, щоб перемістити вгору масажну частину маніпулятора. Відпустіть її в ручному режимі, щоб механізм залишився в поточному положенні.
 Down	Довго натискайте, щоб перемістити вниз масажну частину маніпулятора. Відпустіть її в ручному режимі, щоб механізм залишився в поточному положенні.
	Натисніть і утримуйте її, щоб спинка піднялася, і регулювання пози припиниться після її відпускання.
	Натисніть і утримуйте її, щоб спинка впала, і регулювання пози припиниться після її відпускання.
	Натисніть цю кнопку, щоб призупинити/відновити функцію.
 Zero-G	Натисніть її, щоб увімкнути/вимкнути масаж у невагомості. Масажне крісло перейде в повністю розслаблене масажне положення та перейде в напівлежачий стан космічної капсули. Зніміть тиск тіла та розслабте м'язи. Натисніть її ще раз, щоб вимкнути стан невагомості.

Примітка: крісло не буде скинуто за замовчуванням після завершення «Режиму масажу сну». Натисніть „кнопку можна скинути та вимкнути крісло.

4. Експлуатація продукту

Ключові функції дистанційного керування

Натисніть кнопку автоматичного режиму, щоб вибрати відповідні процедури автоматичного масажу.

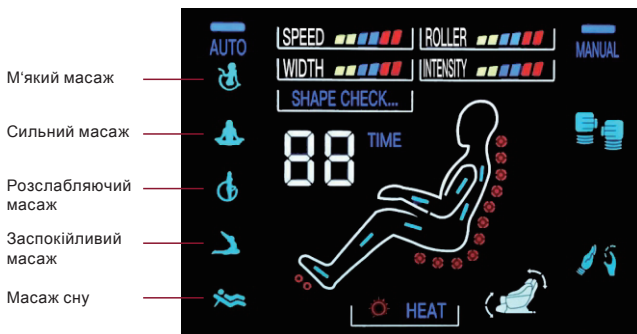

Піктограми у верхньому лівому куті екрана представляють 5 автоматичних режимів:

Режим м'якого масажу: Розслаблення напружених м'язів, помірна інтенсивність.

Режим сильного масажу: Зняття болю в м'язах, сильна інтенсивність.

Режим розслаблюючого масажу: підходить для масажу на дозвіллі, м'яка сила.


Режим заспокійливого масажу: Зняття болю в м'язах, помірна інтенсивність.

Режим масажу сну: сприяння кровообігу, м'яка сила.

Примітка: Після ввімкнення масажного крісла пролунають три підказки «Ді-Ді-Ді», що означає, що крісло перейде в режим сканування плечей. У цей час ви можете довго натискати кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб відрегулювати положення плечей масажера. Після відпускання крісло буде на першій автоматичній програмі «м'який масаж» після ще трьох звукових сигналів «Ді-Ді-Ді».

4. Експлуатація продукту

Функції, які ще можна використовувати в автоматичному режимі:

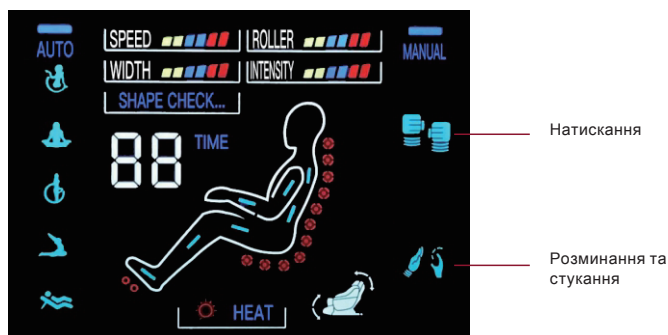

Натисніть кнопку «Ручні режими» для перемикавання техніки масажу. У верхньому лівому куті екрана відображається поточна техніка масажу.

Увійшовши в ручний режим, усі функції можна регулювати та керувати ними за допомогою функцій кнопок ручного контролера.

Інструкції з підключення Bluetooth

Увімкніть Bluetooth на мобільному телефоні, щоб знайти Bluetooth, знайти локальний Bluetooth (масаж), успішно підібрати, увімкнути Mobile Music і відтворити музику.

5. Очищення / Зберігання / Технічне обслуговування

Щоб ваш продукт працював і виглядав якнайкраще, дотримуйтеся цих простих вказівок щодо догляду.



Обережно

1. Перед чищенням обов'язково від'єднайте шнур живлення від електричної розетки
2. Обов'язково випробуйте будь-який миючий розчин на невеликій, непомітній частині виробу, щоб переконатися, що колір не тьмяніє до нанесення розчину на всю поверхню виробу.
3. Щоб підтримувати свій продукт в оптимальному стані, часто витирайте його від пилу та/або пилюсось м'якою щіткою
4. Якщо ваш виріб забруднився, використовуйте лише засіб для чищення оббивки на водній основі.
- 5.

5. Очищення / Зберігання / Технічне обслуговування

Використовуйте м'яку суху тканину, щоб протерти шкіру.

Не очищайте виріб такими хімікатами, як розчинник, бензол, спирт тощо. Під час використання доступних у продажу засобів для догляду за шкірою, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій із використання.

Особливо брудну PU шкіру протріть наступними способами.

1. Змочіть м'яку тканину в теплій воді з 3-5% нейтральним миючим засобом і ретельно віджміть.
 2. Потім протріть шкіряну поверхню м'якою тканиною, згаданою вище.
 3. Видаліть миючий засіб тканиною, змоченою чистою водою та ретельно віджатою.
 4. Висушіть шкіру м'якою, добре віджатою тканиною.
 5. Нарешті дайте шкірі висохнути на повітрі.
- Якщо є плями, які важко видалити, ми рекомендуємо занурити шматок звичайної мелямінової піни в суміш нейтрального миючого засобу з водою і протерти нею стілець.
 - Не використовуйте для сушіння поверхні фен.
 - Майте на увазі, що фарба з тканини може стиратися на поверхні PU шкіри. Тому будьте обережні при чищенні крісла джинсами і кольоровими тканинами.
 - Зауважте, що тривалий контакт між цими предметами та пластиком може спричинити перенесення кольору.
 - Будь ласка, зверніть увагу, що поліуретанова шкіра може знебарвити під впливом фарби для волосся. Рекомендуємо покрити

під час фарбування волосся витріть уражену ділянку рушником, щоб уникнути проблем.

Середовище використання та зберігання

1. Щоб не пошкодити оббивку, перш ніж сісти в крісло, переконайтеся, що немає гострих предметів у ваших кишенях і без металевих ґудзиків чи блискавок, які можуть пошкодити крісло.
2. Не розміщуйте крісло там, де надмірна кількість пилу та шерсті домашніх тварин може проникнути в електричні та механічні компоненти: з часом це може призвести до несправності.
3. Якщо крісло не використовується протягом тривалого часу, ми рекомендуємо накривати його, а шнур живлення згорнути на змійовик, і щоб пристрій було розміщено в середовищі, де немає пилу та вологи.
4. Зберігайте крісло при кімнатній температурі від 5 до 122 градусів за Фаренгейтом (від -15 до 50 градусів C) з рівнем вологості від 10% до 70% (без конденсації), щоб уникнути пошкодження; якщо крісло зберігається в холоді, може знадобитися 48 годин при кімнатній температурі для належної роботи.
5. Не зберігайте поблизу відкритого тепла або вогню.

Технічне обслуговування та ремонт

1. Механічні частини цього виробу спеціально розроблені та сконструйовані таким чином, що не потребують обслуговування. Не потрібне періодичне змащування або обслуговування.
2. Ваше крісло має обслуговувати лише представник сервісної служби.

6. Усунення несправностей

Ваше масажне крісло — це витончена комбінація механіки, електроніки та програмного забезпечення, щоб зробити вам неперевершений масаж.

Якщо ваше масажне крісло демонструє будь-яку ненормальну поведінку, зробіть наступне, щоб повністю скинути програми та налаштування крісла:

1. Натисніть кнопку ON/OFF на пульті дистанційного керування, виберіть POWER OFF, потім виберіть RESTORE, щоб відновити крісло.
2. Переведіть вимикач живлення крісла (на задній частині крісла) у положення Вимк.
3. Від'єднайте крісло від джерела живлення.
4. Зачекайте 30 секунд.
5. Знову підключіть крісло до джерела живлення, а потім знову ввімкніть вимикач.

Ваше масажне крісло не вмикається

1. Перевірте шнур живлення. Переконайтеся, що шнур живлення надійно підключений до крісла, а також наявність живлення шнур не пошкоджений.
2. Перевірте розетку. Підключіть до розетки завідомо справний пристрій, щоб переконатися, що розетка працює.
3. Замініть запобіжник. Використовуйте плоску викрутку, щоб повернути тримач запобіжника (розташований поруч із вимикачем живлення) проти годинникової стрілки, доки він не вискочить. Замініть запобіжник на один із запасних запобіжників, які входять до комплекту крісла, або будь-який запобіжник 250 В, 3, 15 А. Як і з будь-якою іншою електронікою, ця проста послідовність скидання вирішить проблему. Проте, якщо проблема залишається, зв'яжіться з нами.

При зміні положення крісло видає звук, схожий на тертя шкіри.

У цьому пристрої використовується високоякісна штучна шкіра, стійка до стирання, яка відповідає екологічним вимогам. Завдяки особливим властивостям шкіряних матеріалів буде створюватися легкий шум тертя при русі у відповідну точку. Це нормальне явище.

Примітка. Якщо під час роботи ви почуєте звук, схожий на розрив тканини або шкіри, припиніть його використовувати негайно та зверніться до нашої служби підтримки.

7. Технічні характеристики

модель:	САПФІР МАССАЖНЕ КРІСЛО
Робоча напруга:	110-220 В ~ / 50/60 Гц
Потужність:	120 Вт
Вага нетто:	70 кг
Вага брутто:	82 кг
Час роботи:	15 хвилин
Регульований час:	10, 15, 20, 25, 30 хв.
Розмір крісла (вертикальний)	151*76*115 см
Розмір крісла (нахилений)	176*76*83 см

8. Спеціальні функції



ТОЧКА

Масажні головки можуть масажувати певну точку



КУЧКУВАННЯ

Шкіра та м'язи захоплюються і розминаються між великим пальцем і вказівним пальцем або обома руками. Ця техніка масажу особливо використовується для зняття напруги.



ПОСТУКУВАННЯ

Короткі постукуючі рухи виконуються краєм руки, долонею або кулаком. Це сприяє кровообігу в шкірі та розслаблює напружені м'язи. Якщо постукування проводиться на рівні легень, це може покращити виведення слизу з легенів.



ШІАЦУ

SHIATSU

Шіацу (натискання пальцями) — це форма тілесної терапії, що походить з Японії. Техніка масажу складається з м'яких, ритмічних, далекосяжних розтягувань і обертів. Метою шіацу є стимуляція окремих частин тіла та мобілізація м'язів.



ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕС

Підйомні та відступаючі повітряні мішки виконують насосоподібні рухи, що спричиняють природні рефлексі м'язів. Це особливо корисно в області литок та стоп.



КНЕДЕННЯ І ПОСТУКУВАННЯ (ДВОЙНА ДІЯ)

Техніки кнеднення та постукування комбінуються для зняття напруги та стимулювання кровообігу одночасно.



АВТОМАТИЧНИЙ

Спеціально розроблені автоматичні програми для всього тіла, які пропонують широкий вибір різних технік масажу. Крім того, ви також можете увімкнути функцію підігріву, якщо бажаєте.

ОБЛАСТЬ СПИНИ

Індивідуально застосовний до будь-якої розміру масажної області.



ВУГЛЕЦЕВИЙ ОБІГРІВ

Глибоко проникаюче вуглецеве інфрачервоне тепло спричиняє розширення кровоносних судин, збільшення кровообігу та зниження тону м'язів. Крім того, воно має дуже корисний вплив на нервові клітини, які відповідають за передачу болю до мозку.



РОЛИК ДЛЯ ПІДОШВИ

Масаж стоп стимулює нервові закінчення та певні органи тіла, що також розслаблює м'язи.



ПОВІТРЯНА ЗОНА

Масаж повітряними подушками для всього тіла. Різні зони можна вибирати індивідуально



BLUETOOTH

Бездротове з'єднання з вашим смартфоном або планшетом забезпечує зручне прослуховування музики



НУЛЬОВА ГРАВІТАЦІЯ

Ви займаєте положення, як у астронавта — відчуття невагомості.



ПРОКАТУВАННЯ

Приємне чергування між розслабленням і розслабленням м'язів — ідеально підходить також для завершального масажу, для відпочинку та відновлення м'язів.



L-ПОДІБНА ФОРМА

Глибоко проникаючий масаж всього тіла від шиї до сідниць.



S-ПОДІБНА ЛІНІЯ

У цій автоматичній програмі масажні головки, що знаходяться особливо близько до тіла, масажують всю спину до сидниці. Механізм у формі літери S змодельований за природною анатомією хребта.



НУЛЬОВИЙ ПРОСТІР

Для положення лежачи масажний стілець рухається вперед, тому потребує дуже мало місця до стіни позаду. Економія простору та комфорт!



2D МАСАЖ

Механізм 2D масажу дозволяє масажному стільцю вимірювати вашу спину та також здатний розпізнавати точне розташування частин вашого хребта.



РЕГУЛЬОВАНА ПІДСТАВКА ДЛЯ НІГ

Підставка для ніг може бути висунута, що дозволяє адаптувати її до різних розмірів тіла.



РЕГУЛЬОВАНА ПОДУШКА.

За потреби подушку можна скласти вдвоє, щоб зменшити інтенсивність масажу шиї та плечей.



ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

Регульованість спинки та підставки для ніг сприяє особистому благополуччю та комфортному положенню тіла.



РЕГУЛЮВАННЯ ПЛЕЧЕЙ

Масажні головки можуть бути переміщені вгору або вниз до зручного положення в області плечей.



ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОВІТРЯ

Регульована інтенсивність масажу повітряними подушками.



ШВИДКІСТЬ

Швидкість масажу регульована.



ШИРИНА

Відстань між обома масажними головками можна налаштувати (вузька, середня та широка).



МУЗИКА

Додаткове розслаблення та задоволення з функцією музики.



РЕФЛЕКСОЛОГІЯ

Рефлексологія відновлює м'язи стоп та має гармонізуючий вплив на майже всі органи всередині вашого тіла.



ВІДЧУТТЯ ЛЮДСЬКИХ РУК

Specially designed massage heads. Спеціально розроблені масажні головки імітують рухи рук професійного масажиста. Максимальний простір для розтягування становить 6,5 см, а максимальний кут розтягування – 41 градус, тому механічні руки можуть ефективно масажувати шийний, грудний та поперековий відділи хребта.



ПІДКЛЮЧАЙ І КОРИСТУЙСЯ.

Масажне крісло постачається повністю зібраним і готове до використання.

9. Декларація відповідності ЄС

Відповідає європейським директивам EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU та RoHs.

10. Гарантійні умови

Роздрібний продавець гарантує встановлений законом термін гарантії на продукт, описаний на звороті. Гарантія діє з дня покупки. Дата покупки повинна бути документально підтверджена доказом покупки.

Роздрібний продавець безкоштовно відремонтує або замінить дефектні продукти, зареєстровані в Німеччині. Це не включає частини, що піддаються зношенню, наприклад тканинні чохла. Несправний пристрій необхідно надіслати з доказом покупки до закінчення гарантійного терміну.

Гарантія втрачає чинність, якщо виникає дефект, спричинений зовнішнім впливом або через ремонт чи модифікацію, виконану, наприклад, не виробником чи авторизованим дилером. Гарантія продавця обмежується ремонтом або заміною продукту. За цією гарантією виробник або роздрібний продавець не несе подальшої відповідальності та не несе відповідальності за збитки через недотримання інструкцій із використання та/або неправильне використання продукту. Якщо після перевірки продукту виробник визначить, що гарантійна вимога не стосується дефекту, на який поширюється гарантія, або що гарантійний термін минув, клієнт несе відповідальність за витрати на перевірку та ремонт.

Юридична інформація: жоден із вмісту не містить жодних терапевтичних претензій. Діагностика та терапія захворювань та інших фізичних розладів вимагає лікування лікаря, нетрадиційного лікаря або терапевта. Заяви, зроблені тут, є лише інформативними і не повинні використовуватися як заміна лікування. Кожного користувача проінструктовано ретельно оцінити свою ситуацію та, якщо необхідно, проконсультуватися з лікарем, щоб визначити, чи буде використання продукту корисним у його власному унікальному випадку. Кожне використання або терапія здійснюється на власний ризик користувача. Ми відмежовуємося від будь-яких терапевтичних заяв або зобов'язань.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Падерборн, Німеччина
info@casada.com
www.casada.com

Авторські права Зображення та тексти є об'єктом авторського права CASADA International GmbH і не можуть використовуватися далі без прямого підтвердження.

Авторське право © 2025 CASADA International GmbH.

Всі права захищені.

КАСАДА Україна
+38 050 183-83-83
+38 067 576-23-23
<https://casada.ua>